

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	--

Editée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
F17140	SPECULUM COLLIN MODELE LOURD LONGUES VALVES 40X150MM	3661219067603
	COLLIN SPECULUM HEAVY MODEL WITH LONG BLADES 40X150MM	 3 661219 067603

Catalogues / catalogs

Landanger 2015

Chapitre-page

08-031

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

L A N D A N G E R

Spéculums vaginaux - Vaginal speculas - Espécúlos vaginales

COLLIN

	F16000 90 x 14 mm
	F16010 90 x 16 mm
	F16020 90 x 25 mm
	F16030 90 x 30 mm
	F16034 95 x 35 mm
	F16038 105 x 30 mm
	F16040 105 x 35 mm
	F16050 105 x 38 mm
	F16060 110 x 42 mm

Modèle lourd
Heavy model
Fuerte modelo


F17016	100 x 16 mm
F17025	100 x 25 mm
F17030	100 x 30 mm
F17035	100 x 35 mm
F17040	100 x 40 mm

Longues valves
Long blades
Valvulas largas

F17130	150 x 30 mm
F17135	150 x 35 mm
F17140	150 x 40 mm

Modèles avec tube d'aspiration
Models with aspiration tube
Modelos con tubo de aspiración

	F18125 90 x 25 mm
	F18130 90 x 30 mm
	F18135 95 x 35 mm
	F18230 105 x 30 mm
	F18235 105 x 35 mm
	F18240 110 x 40 mm

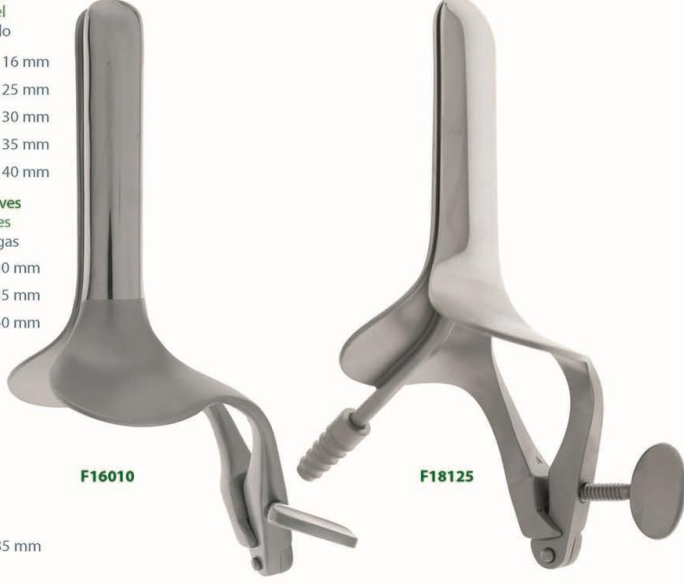

F16010 **F18125**

PALMER

F17165	65 x 35 mm
---------------	------------

VIII - 31

VIII - Vaginales
VIII - Gynäkol. Procto
VIII - Gyn. Urol. Procto

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015

4/5

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
F17140	SPECULUM COLLIN MODELE LOURD LONGUES VALVES 40X150MM	3661219067603
	COLLIN SPECULUM HEAVY MODEL WITH LONG BLADES 40X150MM	 3 661219 067603

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :

I-MDR

Code GMDN :

35352

CE Class :

GMDN code :

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :

REUTILISABLE/REUSABLE

Operating room medical device :

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Material type :

Nuance matière :

X2CrNi19-11(1.4306)

Material grade :

Dimensions :

Voir désignations produits

Landanger 2015

Outer dimensions :

See products description

Chapitre-pages

08-031

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.

Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement :

Pochette plastique en polyéthylène (PE).

Packaging :

Polyethylene plastic pouch (PE).