

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	--

Éditée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
F36105	MANDRIN DILATATEUR HEGAR SIMPLE 10.5MM	3661219069324
	HEGAR UTERINE DILATOR SIMPLE STAINLESS STEEL 10.5MM	

Catalogues / catalogs

Landanger 2015

Chapitre-page

08-082

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

L A N D A N G E R

Dilatateurs utérins - Uterine dilators - Dilatadores uterinos

	HEGAR			PALMER			
Modèle simple Simple model Modelo simple		Ø	Ø		Ø		
		F36010	1 mm		F36015	1,5 mm	
		F36020	2 mm		F36025	2,5 mm	
		F36030	3 mm		F36035	3,5 mm	
		F36040	4 mm		F36045	4,5 mm	
		F36050	5 mm		F36055	5,5 mm	
		F36060	6 mm		F36065	6,5 mm	
		F36070	7 mm		F36075	7,5 mm	
		F36080	8 mm		F36085	8,5 mm	
		F36090	9 mm		F36095	9,5 mm	
		F36100	10 mm		F36105	10,5 mm	
		F36110	11 mm		F36115	11,5 mm	
		F36120	12 mm		F36125	12,5 mm	
		F36130	13 mm		F36135	13,5 mm	
		F36140	14 mm		F36145	14,5 mm	
		F36150	15 mm		F36155	15,5 mm	
			F36160		16 mm	F36165	16,5 mm
			F36170		17 mm	F36175	17,5 mm
			F36180		18 mm	F36185	18,5 mm
		F36190	19 mm	F36195	19,5 mm		
		F36200	20 mm				
		F36210	21 mm				
		F36220	22 mm				
		F36230	23 mm				
		F36240	24 mm				
		F36250	25 mm				
		F36260	26 mm				
		F362610	27 mm				
		F362620	28 mm				
		F362630	29 mm				
		F362640	30 mm				
	F36160	18 cm - 7"		F366012	23 cm - 9"		

VIII - Voies basses
VIII - Gyné/Procto
VIII - Gyné/Uro/Practo

VIII - 82

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
F36105	MANDRIN DILATATEUR HEGAR SIMPLE 10.5MM	3661219069324
	HEGAR UTERINE DILATOR SIMPLE STAINLESS STEEL 10.5MM	 3 661219 069324

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I-MDR

Code GMDN :
GMDN code :

11267

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X2CrNi19-11(1.4306)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Landanger 2015

08-082

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*