

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	--

Editée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
F365100	DILATATEUR DOUBLE DE HANK D:9.5 & 10.0MM L:275MM	3661219206910
	HANK DOUBLE DILATOR D:9.5 & 10.0MM L:275MM	 3 661219 206910

Catalogues / catalogs

Landanger 2015

Chapitre-page

08-084

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

L A N D A N G E R

Dilatateurs utérins - Uterine dilators - Diladores uterinos

HEGAR	HANK	PRATT
Modèle double Double model Modelo doble 		
Ø F36400 1 x 2 mm F36410 3 x 4 mm F36420 5 x 6 mm F36430 7 x 8 mm F36440 9 x 10 mm F36450 11 x 12 mm F36460 13 x 14 mm F36470 15 x 16 mm F36480 17 x 18 mm F36485 19 x 20 mm F36490 21 x 22 mm F36494 23 x 24 mm F36498 25 x 26 mm	Ø Fig. US F365050 4,5 x 5 mm 9/10 F365060 5,5 x 6 mm 11/12 F365070 6,5 x 7 mm 13/14 F365080 7,5 x 8 mm 15/16 F365090 8,5 x 9 mm 17/18 F365100 9,5 x 10 mm 19/20	Ø F365200 4,5 x 5,0 mm F365201 5,6 x 6,3 mm F365202 7,0 x 7,6 mm F365203 8,3 x 9,0 mm F365204 9,6 x 10,3 mm F365205 11,0 x 11,6 mm F365206 12,3 x 13,0 mm F365207 13,6 x 14,3 mm
F36440 20 cm - 8"	F365050 27,5 cm - 10 3/4"	F365203 28 cm - 11"

VIII - Voies basses
VIII - Gynae Uro/Procto
VIII - Gynae Uro/Procto

VIII - 84

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
F365100	DILATATEUR DOUBLE DE HANK D:9.5 & 10.0MM L:275MM	3661219206910
	HANK DOUBLE DILATOR D:9.5 & 10.0MM L:275MM	 3 661219 206910

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I-MDR

Code GMDN :
GMDN code :

11267

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X2CrNi19-11(1.4306)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Landanger 2015

08-084

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Sterilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*