

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	--

Editée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
G30152L	PORTE AIGUILLE DEBAKEY L:180MM TUNGSTENE POUR GAUCHER	3661219343189
	DEBAKEY NEEDLE HOLDER L:180MM JAWS TC, LEFT-HANDED	

Catalogues / catalogs

Landanger 2015

Chapitre-page

06-020

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

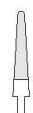
L A N D A N G E R

Porte-aiguilles vasculaires - Vascular needle holders - Porta agujas vasculares

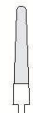


G30152
18 cm - 7"

DEBAKEY			
	Standard Standard Standard	Fin Fine Fino	
	G30152L 18 cm - 7"	G30152	0,4
	G30153L 20 cm - 8"	G30153	0,3
	G30154L 23 cm - 9"	G30154	
	26 cm - 10 1/4"	G30155	
	30 cm - 11 3/4"	G30156	
		G301521	
		G301531	
		G301541	
		G301551	
		G301561	


G30152
18 cm - 7"


G301521
18 cm - 7"


G30153
20 cm - 8"


G301531
20 cm - 8"


G30154
23 cm - 9"


G301541
23 cm - 9"


G30155
26 cm - 10 1/4"


G301551
26 cm - 10 1/4"


G30156
30 cm - 11 3/4"


G301561
30 cm - 11 3/4"

TC Inserts



VI - Sutures
VI - Sutures
VI - Sutura

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
G30152L	PORTE AIGUILLE DEBAKEY L:180MM TUNGSTENE POUR GAUCHER	3661219343189
	DEBAKEY NEEDLE HOLDER L:180MM JAWS TC, LEFT-HANDED	 3 661219 343189

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

12726

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE + TUNGSTENE / STAINLESS STEEL + TUNGSTEN

Nuance matière :
Material grade :

X20Cr13(1.4021) + TUNGSTENE

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Landanger 2015

06-020

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*