

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
G301960	PORTE AIGUILLE HEGAR OLSEN L:180MM	3661219343240
	HEGAR OLSEN NEEDLE HOLDER SCISSORS L:180MM	 3 661219 343240

Catalogues / *catalogs*

Landanger 2015

Chapitre-page

06-023

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*

L A N D A N G E R

Porte-aiguilles - Needle holders - Porta agujas

HEGAR-OLSEN-BABY <table border="0"> <tr> <td>14 cm - 5 1/2"</td> <td>G301990</td> <td>G301950</td> </tr> <tr> <td>16 cm - 6 3/4"</td> <td>G30200</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>18 cm - 7"</td> <td>-</td> <td>G301960</td> </tr> </table>	14 cm - 5 1/2"	G301990	G301950	16 cm - 6 3/4"	G30200	-	18 cm - 7"	-	G301960	HEGAR-OLSEN <table border="0"> <tr> <td>14 cm - 5 1/2"</td> <td>G301990</td> <td>G301950</td> </tr> <tr> <td>16 cm - 6 3/4"</td> <td>G30200</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>18 cm - 7"</td> <td>-</td> <td>G301960</td> </tr> </table>	14 cm - 5 1/2"	G301990	G301950	16 cm - 6 3/4"	G30200	-	18 cm - 7"	-	G301960
14 cm - 5 1/2"	G301990	G301950																	
16 cm - 6 3/4"	G30200	-																	
18 cm - 7"	-	G301960																	
14 cm - 5 1/2"	G301990	G301950																	
16 cm - 6 3/4"	G30200	-																	
18 cm - 7"	-	G301960																	

Inox
Stainless steel
Aceno inoxidable



D01120
12 cm - 4 3/4"

TC Inserts



Inox
Stainless steel
Aceno inoxidable



G30200
16 cm - 6 1/4"

D01130
12 cm - 4 3/4"



G301950
18 cm - 7"



VI - 23

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015

1/1

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
G301960	PORTE AIGUILLE HEGAR OLSEN L:180MM	3661219343240
	HEGAR OLSEN NEEDLE HOLDER SCISSORS L:180MM	 3 661219 343240

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

12726

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X20Cr13(1.4021)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Landanger 2015

06-023

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*