

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	--

Editée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
HF0200000	ADAPTATEUR BIPOLAIRE DEUX CONNECTEURS FEMELLES ESPACES DE 29MM ADAPTABLES SUR GENERATEUR MARTIN	3661219385103
	<i>BIPOLAR ADAPTOR 2 FEMALE CONNECTORS SPACED OUT FROM 29MM ADAPTABLE ON MARTIN GENERATOR</i>	

Catalogues / catalogs

ElectroChir 2015

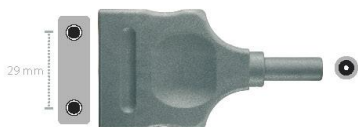
Chapitre-page

48

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*

L A N D A N G E R

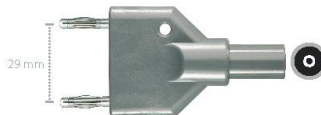
Adaptateurs bipolaires - *Bipolar adapters* - Adaptadores bipolares

Générateur Martin
Martin generator
Generador Martin


HF0200000

Générateur Erbe
Erbe generator
Generador Erbe


HF0200001

Câble Martin
Martin cable
Cable Martin


HF0200002

Câble Erbe
Erbe cable
Cable Erbe


HF0200003

Adaptateurs monopolaires - *Monopolar adapters* - Adaptadores monopolares

Générateur Martin
Martin generator
Generador Martin


HF0200011

Générateur Erbe
Erbe generator
Generador Erbe


HF0200012

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
HF0200000	ADAPTATEUR BIPOLAIRE DEUX CONNECTEURS FEMELLES ESPACES DE 29MM ADAPTABLES SUR GENERATEUR MARTIN	3661219385103
	BIPOLAR ADAPTOR 2 FEMALE CONNECTORS SPACED OUT FROM 29MM ADAPTABLE ON MARTIN GENERATOR	 3 661219 385103

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I-MDR

Code GMDN :
GMDN code :

35041

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

POLYMER + CUIVRE / POLYMER + COPPER

Nuance matière :
Material grade :

PP + CuBe (Ni plated)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

ElectroChir 2015

48

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*