

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
HF1618301	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE DROITE 1,0MM MOUSSE L:180MM CONNECTEUR 2 BROCHES	3661219273431
	<i>BIPOLAR FORCEPS 180 MM BAYONET STRAIGHT BLUNT 1,0 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>	 3 661219 273431

Catalogues / *catalogs*

OrthoVertebre 2019

Chapitre-page

27


DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*

L A N D A N G E R

Pinces Bipolaires - Bipolar Forcep - Pinzas Bipolares

500 Vp max


Droite
Straight
Recto

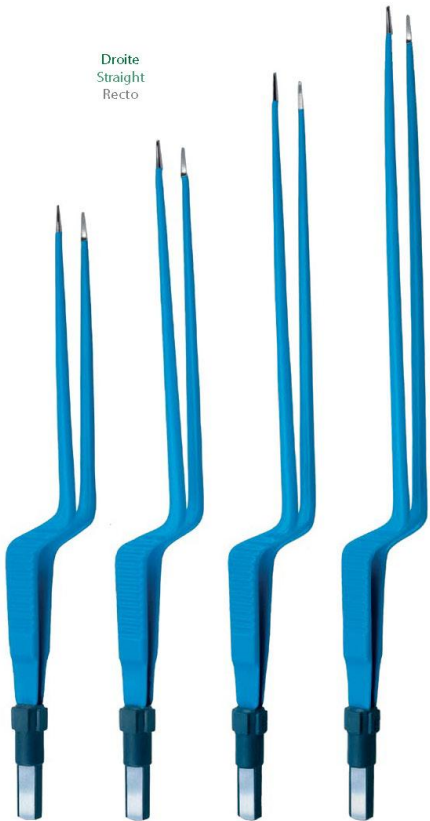

Largeur des pointes
Width of tips
Anchura de las puntas

0,3 mm	
1,0 mm	
2,0 mm	

Connecteur
Plug
Enchufe

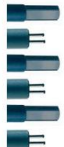

180 mm - 7"	200 mm - 7 ⁷ / ₈ "	220 mm - 8 ⁷ / ₈ "	240 mm - 9 ¹ / ₂ "
HF1518300	HF1520300	HF1522300	HF1524300
HF1618300	HF1620300	HF1622300	HF1624300
HF1518301	HF1520301	HF1522301	HF1524301
HF1618301	HF1620301	HF1622301	HF1624301
HF1518302	HF1520302	HF1522302	HF1524302
HF1618302	HF1620302	HF1622302	HF1624302

Copyright © LANDANGER - 2019

4/5

27

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
HF1618301	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE DROITE 1,0MM MOUSSE L:180MM CONNECTEUR 2 BROCHES	3661219273431
	BIPOLAR FORCEPS 180 MM BAYONET STRAIGHT BLUNT 1,0 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG	 3 661219 273431

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

IIb

Code GMDN :
GMDN code :

47848

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE + POLYMERE / STAINLESS STEEL + POLYMER

Nuance matière :
Material grade :

X20Cr13(1.4021) + X15Cr13(1.4024) + PEEK + Rilsan bleu

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

OrthoVertebre 2019

27

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*