

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	--

Editée le / Publishing date

2022-04-29

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
HF52011805	PINCE BIPOLAIRE TITANE BAIONNETTE DROITE 0,5MM MOUSSE L:180MM CONNECTEUR PLAT	3661219448037
	BIPOLAR TITANIUM FORCEPS 180MM BAYONET STRAIGHT BLUNT 0,5MM, INSULATED, FLAT-PLUG	

Catalogues / catalogs

ElectroChir 2015

Chapitre-page

23

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

L A N D A N G E R

Pinces bipolaires en titane - Titanium Bipolar forceps - Pinzas bipolares de titanio

500Vp max

Titane
Titanium
Titanio

Droite
Straight
Recta



Baïonnette
Bayonet
Baioneta

Largeur des pointes Width of tips Anchura de las puntas		Connecteur Plug Enchufe	180 mm	180 mm	200 mm	220 mm
0,5			HF51011805 HF51021805	HF52011805 HF52021805	HF52012005 HF52022005	HF52012205 HF52022205
1,0			HF51011810 HF51021810	HF52011810 HF52021810	HF52012010 HF52022010	HF52012210 HF52022210
2,0			HF51011820 HF51021820	HF52011815 HF52021815	HF52012015 HF52022015	HF52012215 HF52022215

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-29

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
HF52011805	PINCE BIPOLAIRE TITANE BAIONNETTE DROITE 0,5MM MOUSSE L:180MM CONNECTEUR PLAT	3661219448037
	BIPOLAR TITANIUM FORCEPS 180MM BAYONET STRAIGHT BLUNT 0,5MM, INSULATED, FLAT-PLUG	 3 661219 448037

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

IIb

Code GMDN :
GMDN code :

47848

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE + TITANE + POLYMERE / STAINLESS STEEL +
TITANIUM + POLYMER

Nuance matière :
Material grade :

TITANE + PEEK + Rilsan bleu

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

ElectroChir 2015

23

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*