

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-29

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
HF52011815	PINCE BIPOLAIRE TITANE BAIONNETTE DROITE 1,5MM MOUSSE L:180MM CONNECTEUR PLAT	3661219448051
	<i>BIPOLAR TITANIUM FORCEPS 180MM BAYONET STRAIGHT BLUNT 1,5MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>	

Catalogues / *catalogs*

ElectroChir 2015

Chapitre-page

23

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*

L A N D A N G E R

Pinces bipolaires en titane - *Titanium Bipolar forceps* - Pinzas bipolares de titanio

500Vp max

Titane
Titanium
Titanio

Droite
Straight
Recta

Baïonnette
Bayonet
Baioneta



8mm

5mm

180 mm

180 mm 200 mm 220 mm

Largueur des pointes Width of tips Anchura de las puntas	Connecteur Plug Enchufe				
0,5		HF51011805	HF52011805	HF52012005	HF52012205
1,0		HF51011810	HF52011810	HF52012010	HF52012210
2,0		HF51011820	HF52011815	HF52012015	HF52012215

Copyright© LANDANGER - 2009 - 2020



LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-29

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
HF52011815	PINCE BIPOLAIRE TITANE BAIONNETTE DROITE 1,5MM MOUSSE L:180MM CONNECTEUR PLAT	3661219448051
	BIPOLAR TITANIUM FORCEPS 180MM BAYONET STRAIGHT BLUNT 1,5MM, INSULATED, FLAT-PLUG	 3 661219 448051

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

IIb

Code GMDN :
GMDN code :

47848

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE + TITANE + POLYMERE / STAINLESS STEEL +
TITANIUM + POLYMER

Nuance matière :
Material grade :

TITANE + PEEK + Rilsan bleu

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

ElectroChir 2015

23

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*