

|                   |                                                                  |                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| L A N D A N G E R | <b>FICHE TECHNIQUE PRODUIT</b><br><b>PRODUCT TECHNICAL SHEET</b> | <b>FAQ 026 INFO</b><br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

Editée le / Publishing date

2022-04-29

Page

1

| REFERENCE | DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS                                       | CODE EAN                                                                            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| I010064   | LARYNGOSCOPE CHIRURGICAL EXTENSIBLE LU 140MM AJUSTABLE POUR HOMME | 3661219401865                                                                       |
|           | SPREADABLE SURGICAL LARYNGOSCOPE WL 140MM SPREADABLE FOR MEN      |  |

Catalogues / catalogs

ORL 2021

Chapitre-page

326

### DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

## L A N D A N G E R

Laryngoscopes - Laryngoscopes - Laringoscopios

|                     | A            | B            |         |
|---------------------|--------------|--------------|---------|
| Fig. 1 - L : 105 mm | Ø 11 mm      | 19,5 x 12 mm | I010060 |
| Fig. 2 - L : 120 mm | Ø 11 mm      | 21 x 13 mm   | I010061 |
| Fig. 3 - L : 150 mm | Ø 12 mm      | 21 x 13 mm   | I010062 |
| Fig. 4 - L : 140 mm | Ø 14,5 mm    | 27 x 15 mm   | I010063 |
| Fig. 5 - L : 140 mm | Ø 16 mm      | 29 x 19 mm   | I010064 |
| Fig. 6 - L : 150 mm | Ø 13 x 18 mm | 26 x 17 mm   | I010065 |
| Fig. 7 - L : 190 mm | Ø 13 x 18 mm | 26 x 17 mm   | I010066 |











326

Copyright © LANDANGER - 2018 - 2021

|           |                                                           |                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| LANDANGER | FICHE TECHNIQUE PRODUIT<br><i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i> | FAQ 026 INFO<br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-29

Page

2

| REFERENCE | DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>                                   | CODE EAN                                                                                               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I010064   | LARYNGOSCOPE CHIRURGICAL EXTENSIBLE LU 140MM<br>AJUSTABLE POUR HOMME | 3661219401865                                                                                          |
|           | SPREADABLE SURGICAL LARYNGOSCOPE WL 140MM SPREADABLE<br>FOR MEN      | <br>3 661219 401865 |

### INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :  
*CE Class :*

I-MDR

Code GMDN :  
*GMDN code :*

36637

### PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :  
*Operating room medical device :*

REUTILISABLE/REUSABLE

### CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :  
*Material type :*

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :  
*Material grade :*

X5CrNi18-10(1.4301) + X8CrNiS18-9(1.4305)

Dimensions : Voir désignations produits  
*Outer dimensions :* *See products description*  
Chapitre-pages

ORL 2021

326

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.  
*Cleaning / Pre-disinfection :* *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

| Méthode de stérilisation à la vapeur saturée | Température     | Durée      | Temps de séchage | Pression absolue            |
|----------------------------------------------|-----------------|------------|------------------|-----------------------------|
| Pré-vide                                     | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes       | 2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |

*Sterilization process :*

*The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.*

| Saturated steam sterilization method | Temperature     | Time       | Drying time | Absolute pressure          |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-------------|----------------------------|
| Pre-vacuum                           | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes  | 2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |

### EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).  
*Packaging :* *Polyethylene plastic pouch (PE).*