

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	--

Editée le / Publishing date

2022-04-29

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
I010070	POIGNEE POUR TUBE HYPOPHARYNGOSCOPE ET OESOPHAGOSCOPE	3661219445692
	HANDLE FOR HYPOPHARYNGOSCOPE AND ESOPHAGOSCOPE	

Catalogues / catalogs

ORL 2021

Chapitre-page

318

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*

L A N D A N G E R

Biopsie & corps étrangers - Biopsy & foreign bodies - Biopsia y cuerpos extraños



L

	200 mm	300 mm	500 mm
Hypopharyngoscope	I010071	-	-
Esophagoscope	-	I010072	I010073



Poignée
Handle
Mango

I010070
13,5 cm - 5 1/4"




I010071
25 cm - 9 3/4"



2 mm 2,5 mm 3 mm

230 mm

I050323	I050324	I050325
---------	---------	---------

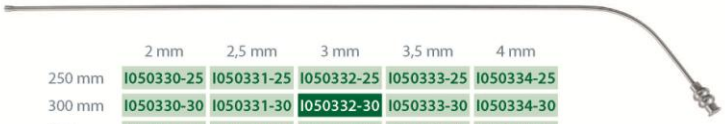

2 mm 2,5 mm 3 mm 3,5 mm 4 mm

250 mm	I050330-25	I050331-25	I050332-25	I050333-25	I050334-25
300 mm	I050330-30	I050331-30	I050332-30	I050333-30	I050334-30
350 mm	I050330-35	I050331-35	I050332-35	I050333-35	I050334-35
450 mm	I050330-45	I050331-45	I050332-45	I050333-45	I050334-45
550 mm	I050330-55	I050331-55	I050332-55	I050333-55	I050334-55

318

1/2

Copyright © LANDANGER - 2018 - 2021

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-29

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
I010070	POIGNEE POUR TUBE HYPOPHARYNGOSCOPE ET OESOPHAGOSCOPE	3661219445692
	HANDLE FOR HYPOPHARYNGOSCOPE AND ESOPHAGOSCOPE	 3 661219 445692

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :

I-MDR

Code GMDN :

GMDN code :

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :

Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :

Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :

Material grade :

X2CrNi19-11(1.4306)

Dimensions :

Voir désignations produits

ORL 2021

Outer dimensions :

See products description

Chapitre-pages

318

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.

Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement :

Pochette plastique en polyéthylène (PE).

Packaging :

Polyethylene plastic pouch (PE).