

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	--

Editée le / Publishing date

2022-04-29

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
I010172	CISEAUX LARYNGE L:170MM COURBE DROITE, TUBE CONIQUE 2,0/1,0MM	3661219402305
	MICRO LARYNGEAL SCISSORS L:170MM RIGHT CURVED, CONICAL SHAFT 2,0/1,0MM	 3 661219 402305

Catalogues / catalogs

ORL 2021

Chapitre-page

332

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

L A N D A N G E R

Micro ciseaux - Micro scissors - Micro tijeras

170 mm

Ø 1 mm

Droit Straight Recta	Coudé 45° Angled 45° Curva 45°	Courbe droite Right curve Curva derecha	Courbe gauche Left curve Curva izquierda
I010170	I010176	I010172	I010174

Ouverture horizontale
Horizontal opening
Apertura horizontal

I010144 I010145



I010170
27 cm - 10 1/2"

220 mm

Ø 1 mm

Ø 2 mm

Ø 2 mm

Droit Straight Recta	Coudé 45° Angled 45° Curva 45°	Courbe droite Right curve Curva derecha	Courbe gauche Left curve Curva izquierda
I010171	I010177	I010173	I010175
I010140	I010143	I010141	I010142

Ouverture horizontale
Horizontal opening
Apertura horizontal

I010178 I010179



I010143
32 cm - 12 3/4"

250 mm

Ø 2 mm

Droit Straight Recta	Coudé 45° Angled 45° Curva 45°	Courbe droite Right curve Curva derecha	Courbe gauche Left curve Curva izquierda
I010090	I010093	I010091	I010092

Ouverture horizontale
Horizontal opening
Apertura horizontal

I010094 I010095



I010093
35 cm - 10"

332



Copyright © LANDANGER - 2018 - 2021

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-29

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
I010172	CISEAUX LARYNGE L:170MM COURBE DROITE, TUBE CONIQUE 2,0/1,0MM	3661219402305
	MICRO LARYNGEAL SCISSORS L:170MM RIGHT CURVED, CONICAL SHAFT 2,0/1,0MM	 3 661219 402305

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

38727

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X20Cr13(1.4021) + X5CrNi18-10(1.4301) + X8CrNiS18-9(1.4305) + X10CrNi18-8(1.4310)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : See products description
Chapitre-pages

ORL 2021

332

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : Standard conditions for reusable surgical instruments

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : Polyethylene plastic pouch (PE).