

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	--

Editée le / Publishing date

2022-04-29

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
I050106	MICRO CROCHET L:160MM ANGULEE, CROCHET 0,4MM COUDE BAS 45° DE SCHUKNECHT	3661219403418
	SCHUKNECHT MICRO HOOK L:160MM SHAFT ANGLED, 0.4MM 45° CURVED DOWNWARDS	 3 661219 403418

Catalogues / catalogs

ORL 2021

Chapitre-page

175

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

L A N D A N G E R

Micro crochets - Micro hooks - Micro ganchos

Pointe
Pick
Punto

I050085 

Mousse
Blunt
Despuntar

I050086

SCHUKNECHT



I050085

16 cm - 6 1/4"

 1/1

I050101

16 cm - 6 1/4"

Crochet Hook Gancho	45° Droite 45° Right 45° Derecha	45° Haut 45° High 45° Alto	45° Bas 45° Down 45° Abajo
∅: 0,2 mm	I050099	I050100	I050105
∅: 0,4 mm	 I050101	I050102	I050106
∅: 0,6 mm	I050102	I050103	I050107
∅: 0,8 mm	I050103	I050104	I050108
∅: 1,0 mm	I050104	I050109	

Crochet Hook Gancho	90° Droite 90° Right 90° Derecha	90° Gauche 90° Left 90° Izquierda
∅: 0,2 mm	 I050090	I050095
∅: 0,4 mm	I050091	I050096
∅: 0,6 mm	I050092	I050097
∅: 0,8 mm	I050093	I050098

Crochet Hook Gancho	90° Haut 90° High 90° Alto	90° Bas 90° Down 90° Abajo
∅: 0,2 mm	I050110	I050115
∅: 0,4 mm	I050111	I050116
∅: 0,6 mm	I050112	I050117
∅: 0,8 mm	I050113	I050118
∅: 1,0 mm	 I050114	I050119

Vf - Pickage
Vf - Gancho
Vf - Gancho

175

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-29

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
I050106	MICRO CROCHET L:160MM ANGULEE, CROCHET 0,4MM COUDE BAS 45° DE SCHUKNECHT	3661219403418
	SCHUKNECHT MICRO HOOK L:160MM SHAFT ANGLED, 0.4MM 45° CURVED DOWNWARDS	 3 661219 403418

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

46768

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X20Cr13(1.4021)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : See products description
Chapitre-pages

ORL 2021

175

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : Standard conditions for reusable surgical instruments

Sterilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : Polyethylene plastic pouch (PE).