

|                   |                                                                  |                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| L A N D A N G E R | <b>FICHE TECHNIQUE PRODUIT</b><br><b>PRODUCT TECHNICAL SHEET</b> | <b>FAQ 026 INFO</b><br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

Editée le / Publishing date

2022-04-29

Page

1

| REFERENCE | DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS                        | CODE EAN                                                                                               |
|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I050144   | DISSECTEUR L:160MM DOUBLE COURBURE GAUCHE DE FISCH | 3661219403722                                                                                          |
|           | FISCH DISSECTOR L:160MM DOUBLE CURVED LEFT         | <br>3 661219 403722 |

Catalogues / catalogs

ORL 2021

Chapitre-page

170

# **DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION**

L A N D A N G E R

Micro décolleurs - Micro elevators - Micro elevadores

ROSEN

BEALES

FISCH

Simple Courbure  
Simple Curvature  
Curvatura simple

Double Courbure  
Double Curvature  
Doble Curvatura





I050141

Droite / Right / Derecha

I050143

I050142

Gauche / Left / Izquierda

I050144

1 x 12 mm

1,5 x 5 mm



I050150  
16 cm - 6 1/4"



I050155  
16 cm - 6 1/4"



I050142  
16 cm - 6 1/4"

VI - Chirurgie  
VI - Chirurgie  
VI - Chirurgie

Copyright © LANDANGER - 2018 - 2021

170

 1/1

|           |                                                           |                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| LANDANGER | FICHE TECHNIQUE PRODUIT<br><i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i> | FAQ 026 INFO<br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-29

Page

2

| REFERENCE | DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>                 | CODE EAN                                                                                               |
|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I050144   | DISSECTEUR L:160MM DOUBLE COURBURE GAUCHE DE FISCH | 3661219403722                                                                                          |
|           | FISCH DISSECTOR L:160MM DOUBLE CURVED LEFT         | <br>3 661219 403722 |

### INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :  
*CE Class :*

I

Code GMDN :  
*GMDN code :*

11290

### PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :  
*Operating room medical device :*

REUTILISABLE/REUSABLE

### CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :  
*Material type :*

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :  
*Material grade :*

X46Cr13(1.4034)

Dimensions : Voir désignations produits  
*Outer dimensions :* See products description  
Chapitre-pages

ORL 2021

170

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.  
*Cleaning / Pre-disinfection :* Standard conditions for reusable surgical instruments

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

| Méthode de stérilisation à la vapeur saturée | Température     | Durée      | Temps de séchage | Pression absolue            |
|----------------------------------------------|-----------------|------------|------------------|-----------------------------|
| Pré-vide                                     | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes       | 2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |

*Sterilization process :*

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

| Saturated steam sterilization method | Temperature     | Time       | Drying time | Absolute pressure          |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-------------|----------------------------|
| Pre-vacuum                           | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes  | 2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |

### EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).  
*Packaging :* Polyethylene plastic pouch (PE).