

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-29

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
I051333	SPATULE ABAISSE LANGUE 30,5X75MM, DOUBLE ASPIRATION DE DAVIS BOYLE	3661219404330
	<i>DAVIS-BOYLE TONGUE DEPRESSOR 30.5X75MM, DOUBLE SUCTION TUBES</i>	 3 661219 404330

Catalogues / *catalogs*

ORL 2021

Chapitre-page

292

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*

L A N D A N G E R

Ouvre-bouches - Mouth-gags - Abridor de bocas

MC IVOR

N° 1 - 23 x 70 mm I051314

N° 2 - 25 x 86 mm I051315 

N° 3 - 26 x 100 mm I051316

DAVIS BOYLE

N° 1 - 20 x 35 mm I051325 

N° 2 - 23 x 70 mm I051326

N° 3 - 24 x 80 mm I051327

N° 4 - 25 x 90 mm I051328

N° 5 - 26 x 105 mm I051329

Double aspiration
Double suction
Doble succión

N° 1 - 23 x 65 mm I051331

N° 1^{1/2} - 29 x 70 mm I051332

N° 2 - 30.5 x 75 mm I051333 

N° 2^{1/2} - 31.5 x 80 mm I051334

N° 3 - 32.5 x 85 mm I051335

N° 3^{1/2} - 33 x 95 mm I051336

N° 4 - 34.0 x 105 mm I051337

Enfant
Child
Niño

N° 1 - 17 x 30 mm I051340

N° 2 - 19 x 45 mm I051341

N° 3 - 20 x 60 mm I051342 

N° 4 - 22 x 70 mm I051343

N° 5 - 22 x 80 mm I051344

KILNER DOUGHTY

N° 1 - 28 x 65 mm I051415 

N° 2 - 32 x 75 mm I051416

N° 3 - 37 x 80 mm I051417

N° 4 - 41 x 94 mm I051418

N° 5 - 46 x 103 mm I051419











292

 1/3

Copyright © LANDANGER - 2018 - 2021

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-29

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
I051333	SPATULE ABAISSE LANGUE 30,5X75MM, DOUBLE ASPIRATION DE DAVIS BOYLE	3661219404330
	DAVIS-BOYLE TONGUE DEPRESSOR 30.5X75MM, DOUBLE SUCTION TUBES	 3 661219 404330

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I-MDR

Code GMDN :
GMDN code :

45918

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X20Cr13(1.4021) + X15Cr13(1.4024)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

ORL 2021

292

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*