

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	--

Editée le / Publishing date

2022-04-29

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
I051357	SPATULE ABAISSE LANGUE 34X83MM DE WUERZBURG	3661219404538
	TONGUE DEPRESSOR, WUERZBURG TYPE SIZE 3, 34X83MM	 3 661219 404538

Catalogues / catalogs

ORL 2021

Chapitre-page

293

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

L A N D A N G E R

Ouvre-bouches - Mouth-gags - Abridor de bocas

Modèle mince
Slim model
Modelo delgado

N° 1 - 18 x 55 mm **I051345**

N° 2 - 22 x 65 mm **I051346** 

N° 3 - 27 x 70 mm **I051347**

Sortie côté gauche
Left side exit
Salida del lado izquierdo

N° 1 - 28 x 65 mm **I051350**

N° 2 - 32 x 75 mm **I051351**

N° 3 - 37 x 80 mm **I051352** 

N° 4 - 38 x 100 mm **I051353**

N° 5 - 46 x 108 mm **I051354**

WUERZBURG

N° 1 - 28 x 67 mm **I051355**

N° 2 - 32 x 75 mm **I051356**

N° 3 - 34 x 83 mm **I051357** 

N° 4 - 37 x 96 mm **I051358**

N° 5 - 38 x 103 mm **I051359**

RING

	Droite Right Derecha	Gauche Left Izquierda
N° 2 - 23 x 58 mm	I051364	I051360
N° 3 - 27 x 72 mm	I051365	I051361 
N° 4 - 34 x 87 mm	I051366	I051362
N° 5 - 37 x 95 mm	I051367	I051363

HERBERHOLD

N° 1 - 28 x 63 mm **I051370**

N° 2 - 33 x 73 mm **I051371** 


N° 3 - 37 x 82 mm **I051372**

N° 4 - 42 x 91 mm **I051373**







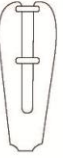








Copyright © LANDANGER - 2018 - 2021

 1/3

293

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-29

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
I051357	SPATULE ABAISSE LANGUE 34X83MM DE WUERZBURG	3661219404538
	TONGUE DEPRESSOR, WUERZBURG TYPE SIZE 3, 34X83MM	 3 661219 404538

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :

I-MDR

Code GMDN :

45918

CE Class :

GMDN code :

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :

REUTILISABLE/REUSABLE

Operating room medical device :

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Material type :

Nuance matière :

X20Cr13(1.4021) + X15Cr13(1.4024)

Material grade :

Dimensions :

Voir désignations produits

ORL 2021

Outer dimensions :

See products description

Chapitre-pages

293

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.

Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement :

Pochette plastique en polyéthylène (PE).

Packaging :

Polyethylene plastic pouch (PE).