

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	--	---

Éditée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
I15050	PINCE TROELTSCH POUR OREILLE L:140MM COUDEE SANS GRIFFES	3661219073123
	TROELTSCH EAR FORCEPS L:140MM ANGLED WITHOUT TEETH	 3 661219 073123

Catalogues / catalogs

Landanger 2015

Chapitre-page

02-038

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

LANDANGER

Pinces à dissection O.R.L. - ENT dissecting forceps - Pinzas para disección O.R.L.

TROELTSCH		
12 cm - 4 3/4" I150490 14 cm - 5 1/2" I15050  17 cm - 6 3/4" I150501  Sans griffes Mors striés Without teeth Serrated jaws Sin dientes Bocas estriadas I15050 14 cm - 5 1/2"	14 cm - 5 1/2" I150504  17 cm - 6 3/4" I150505  Sans griffes Mors fins striés Without teeth Fine jaws serrated Sin dientes Bocas finas estriadas I150504 14 cm - 5 1/2"	14 cm - 5 1/2" I150502  17 cm - 6 3/4" I150503  Sans griffes Mors lisses Without teeth Smooth jaws Sin dientes Bocas lisas I150502 14 cm - 5 1/2"
12 cm - 4 3/4" I150590 14 cm - 5 1/2" I15060  17 cm - 6 3/4" I150601  1 x 2 griffes 1 x 2 teeth 1 x 2 dientes I15060 14 cm - 5 1/2"	14 cm - 5 1/2" I150602  17 cm - 6 3/4" I150603  1 x 2 griffes Mors fins 1 x 2 teeth Fine jaws 1 x 2 dientes Bocas finas I150602 14 cm - 5 1/2"	14 cm - 5 1/2" I150604  17 cm - 6 3/4" I150605  Mors cuillères Spoon jaws Bocas cucharas I150604 14 cm - 5 1/2"

II - Dissection
II - Dissection
II - Dissection

II - 38

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	--	---

Éditée le / Publishing date

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
I15050	PINCE TROELTSCH POUR OREILLE L:140MM COUDEE SANS GRIFFES	3661219073123
	TROELTSCH EAR FORCEPS L:140MM ANGLED WITHOUT TEETH	 3 661219 073123

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / REGULATORY INFORMATION

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

62466

PERFORMANCES REVENDIQUEES / INTENDED PERFORMANCE

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / SPECIFIC FEATURES

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X20Cr13(1.4021)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : See products description
Chapitre-pages

Landanger 2015

02-038

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : Standard conditions for reusable surgical instruments

Sterilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / PACKAGING

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : Polyethylene plastic pouch (PE).