

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	--

Editée le / Publishing date

2022-04-29

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
I151399	SPECULUM PEDIATRIQUE, D:2,0MM DE TOYNBEE (CHROME)	3661219438106
	TOYNBEE SPECULUM, PEDIATRIC, D:2,0MM (CHROME)	

Catalogues / catalogs

ORL 2021

Chapitre-page

129

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

L A N D A N G E R

Spécuments - Speculums - Espéculos

GRUBER	TOYNBEE	
 I151400 fig. 1 - Ø 2,6 mm I151401 fig. 2 - Ø 3,3 mm I151402 fig. 3 - Ø 3 mm I151403 fig. 4 - Ø 4 mm I151404 fig. 5 - Ø 5 mm	 I151405 fig. 1 - Ø 2,4x3,2 mm I151406 fig. 2 - Ø 3,2x4,7 mm I151407 fig. 3 - Ø 3,5x4 mm I151408 fig. 4 - Ø 4x5 mm I151409 fig. 5 - Ø 4x5,5 mm	I151399 fig. 1 - Ø 2 mm
 fig. 1  fig. 3  fig. 2  fig. 4  fig. 5	 fig. 1  fig. 3  fig. 2  fig. 4  fig. 5	 fig. 1
Rond Round Ronda	Ovale Oval Oval	Rond Round Ronda
 Chromé Chromium Cromo	 Chromé Chromium Cromo	 Chromé Chromium Cromo
  I151400 6 cm - 2 1/2"	  I151405 6 cm - 2 1/2"	  I151399 3,5 cm - 1 1/2"
 1/1		

 W. Oetinger
W. Oetinger
W. Oetinger

129

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-29

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
I151399	SPECULUM PEDIATRIQUE, D:2,0MM DE TOYNBEE (CHROME)	3661219438106
	TOYNBEE SPECULUM, PEDIATRIC, D:2,0MM (CHROME)	 3 661219 438106

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I-MDR

Code GMDN :
GMDN code :

35350

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

LAITON CHROME / CHROME BRASS

Nuance matière :
Material grade :

CuZn39Pb3(2.0401)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

ORL 2021

129

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*