

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-29

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
I151617	SPECULUM A MANCHE VALVES 34MM L:150MM DE HARTMANN	3661219405689
	HARTMANN SPECULUM 34MM BLADES L:150MM	 3 661219 405689

Catalogues / *catalogs*

ORL 2021

Chapitre-page

134

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*

L A N D A N G E R

Spéculums - Speculums - Espéculos

BECKMANN <table border="0"> <tr> <td>Pour adulte For adult Para adulto</td> <td>Pour enfant For children Para niño</td> </tr> <tr> <td> I151620</td> <td>I151619</td> </tr> </table>	Pour adulte For adult Para adulto	Pour enfant For children Para niño	 I151620	I151619	HARTMANN <table border="0"> <tr> <td>Pour adulte For adult Para adulto</td> <td>Pour enfant For children Para niño</td> </tr> <tr> <td> I151610</td> <td>I151611</td> </tr> </table>	Pour adulte For adult Para adulto	Pour enfant For children Para niño	 I151610	I151611	<table border="0"> <tr> <td>Valve Blade Valva</td> <td></td> </tr> <tr> <td>27 mm</td> <td>I151615</td> </tr> <tr> <td>30 mm</td> <td>I151616 </td> </tr> <tr> <td>34 mm</td> <td>I151617</td> </tr> </table>	Valve Blade Valva		27 mm	I151615	30 mm	I151616 	34 mm	I151617
Pour adulte For adult Para adulto	Pour enfant For children Para niño																	
 I151620	I151619																	
Pour adulte For adult Para adulto	Pour enfant For children Para niño																	
 I151610	I151611																	
Valve Blade Valva																		
27 mm	I151615																	
30 mm	I151616 																	
34 mm	I151617																	



I151620
15 cm - 6"



I151610
15 cm - 6"



I151616
15 cm - 6"

134

 1/1

Copyright LANDANGER - 2018 - 2021

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-29

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
I151617	SPECULUM A MANCHE VALVES 34MM L:150MM DE HARTMANN	3661219405689
	HARTMANN SPECULUM 34MM BLADES L:150MM	 3 661219 405689

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I-MDR

Code GMDN :
GMDN code :

35350

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X20Cr13(1.4021) + X5CrNi18-10(1.4301) + X8CrNiS18-9(1.4305) + X10CrNi18-8(1.4310)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : See products description
Chapitre-pages

ORL 2021

134

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : Standard conditions for reusable surgical instruments

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : Polyethylene plastic pouch (PE).