

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
I15342	COUTEAU A VEGETATION LERMOYER 14MM	3661219073581
	LERMOYER ADENOIDS CURETTE 14MM	 3 661219 073581

Catalogues / *catalogs*

Landanger 2015

Chapitre-page

12-023

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*

L A N D A N G E R

O.R.L. couteaux à végétations - E.N.T. adenoids knives - O.R.L. cuchillos para vegetaciones

LERMOYER 23 cm - 9" <table border="0"> <tr><td>10 mm</td><td>I15340</td></tr> <tr><td>14 mm</td><td>I15342</td></tr> <tr><td>16 mm</td><td>I15344 </td></tr> <tr><td>20 mm</td><td>I15346</td></tr> </table>	10 mm	I15340	14 mm	I15342	16 mm	I15344 	20 mm	I15346	BECKMANN 21 cm - 8 1/4" <table border="0"> <tr><td>12 mm</td><td>I15348</td></tr> <tr><td>14 mm</td><td>I15350 </td></tr> <tr><td>16 mm</td><td>I15360</td></tr> <tr><td>18 mm</td><td>I15370</td></tr> </table>	12 mm	I15348	14 mm	I15350 	16 mm	I15360	18 mm	I15370
10 mm	I15340																
14 mm	I15342																
16 mm	I15344 																
20 mm	I15346																
12 mm	I15348																
14 mm	I15350 																
16 mm	I15360																
18 mm	I15370																



I15344
23 cm - 9"



I15350
21 cm - 8 1/4"

XII - O.R.L.
XII - E.N.T.
XII - O.R.L.

XII - 23

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015
4/5

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
I15342	COUTEAU A VEGETATION LERMOYER 14MM	3661219073581
	LERMOYER ADENOIDS CURETTE 14MM	 3 661219 073581

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

47525

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X30Cr13(1.4028) + X5CrNi18-10(1.4301)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Landanger 2015

12-023

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*