

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	--

Editée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
I160250	PINCE RONGEUR TAKAHASHI L:120MM DROITE 3X10MM	3661219207801
	TAKAHASHI LAMINECTOMY RONGEUR L:120MM STRAIGHT 3X10MM	

Catalogues / catalogs

Landanger 2015

Chapitre-page

12-028

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

L A N D A N G E R

O.R.L. emporte pièces - E.N.T. punch forceps - O.R.L. sacabocados

XII - O.R.L.
 XII - E.N.T.
 XII - O.R.L.

TAKAHASHI

	Droite Straight Recta		Coudée vers le haut Angled upward Angulada arriba
12 cm - 4 3/4"	I160250	3 x 10 mm	I160260
17 cm - 6 3/4"	I160255	3 x 10 mm	



I160250 12 cm - 4 3/4"

I160260

HARTMANN

12 cm - 4 3/4"	I16055	5 mm
12 cm - 4 3/4"	I160570	7 mm
12 cm - 4 3/4"	I16060	9 mm



ø 5 mm ø 7 mm ø 9 mm

STRUYCKEN

12 cm - 4 3/4" I160611 1,0 x 16 mm



1,0 x 16 mm

GRUENWALD

12 cm - 4 3/4" I171103 3,5 x 10,5 mm

3,5 x 10,5 mm 3,5 x 14 mm

HAJEK

12 cm - 4 3/4" I160620 3,5 x 14 mm



XII - 28

4/5

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2022

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
I160250	PINCE RONGEUR TAKAHASHI L:120MM DROITE 3X10MM	3661219207801
	TAKAHASHI LAMINECTOMY RONGEUR L:120MM STRAIGHT 3X10MM	

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

33442

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X20Cr13(1.4021) + X30Cr13(1.4028)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Landanger 2015

12-028

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*