

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	--

Editée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
I160255	PINCE RONGEUR TAKAHASHI L:170MM DROITE 3X10MM	3661219344506
	TAKAHASHI LAMINECTOMY RONGEUR L:170MM STRAIGHT 3X10MM	

Catalogues / catalogs

Landanger 2015

Chapitre-page

12-028

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

L A N D A N G E R

O.R.L. emporte pièces - E.N.T. punch forceps - O.R.L. sacabocados

XII - O.R.L.
XII - E.N.T.
XII - O.R.L.

TAKAHASHI

	Droite Straight Recta	Coudée vers le haut Angled upward Angulada arriba
12 cm - 4 3/4"	I160250 3 x 10 mm	I160260
17 cm - 6 3/4"	I160255 3 x 10 mm	



I160250 12 cm - 4 3/4"

I160260

HARTMANN


12 cm - 4 3/4"	I16055 5 mm
12 cm - 4 3/4"	I160570 7 mm
12 cm - 4 3/4"	I16060 9 mm



ø 5 mm ø 7 mm ø 9 mm

STRUYCKEN


12 cm - 4 3/4" I160611 1,0 x 16 mm

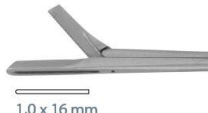

1,0 x 16 mm

GRUENWALD

12 cm - 4 3/4"	I171103 3,5 x 10,5 mm	12 cm - 4 3/4"	I160620 3,5 x 14 mm
----------------	-----------------------	----------------	---------------------

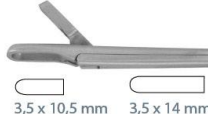

3,5 x 10,5 mm 3,5 x 14 mm

HAJEK

12 cm - 4 3/4" I160620 3,5 x 14 mm

XII - 28

4/5

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2022

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
I160255	PINCE RONGEUR TAKAHASHI L:170MM DROITE 3X10MM	3661219344506
	TAKAHASHI LAMINECTOMY RONGEUR L:170MM STRAIGHT 3X10MM	 3 661219 344506

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :

I

Code GMDN :

33442

CE Class :

GMDN code :

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :

REUTILISABLE/REUSABLE

Operating room medical device :

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Material type :

Nuance matière :

X20Cr13(1.4021) + X30Cr13(1.4028)

Material grade :

Dimensions :

Voir désignations produits

Landanger 2015

Outer dimensions :

See products description

Chapitre-pages

12-028

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.

Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement :

Pochette plastique en polyéthylène (PE).

Packaging :

Polyethylene plastic pouch (PE).