

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	--

Editée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
I180023	CURETTE WILLIGER DOUBLE RONDE L:140MM 3MM	3661219208259
	WILLIGER CURETTE DOUBLE ROUND L:140MM WIDTH 3MM	

Catalogues / catalogs

Landanger 2015

Chapitre-page

12-056

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

L A N D A N G E R

O.R.L. curettes - E.N.T. curettes - O.R.L. curetas

WILLIGER	CLOVIS VINCENT	BILLEAU						
2,0 x 3,0 mm I180022  3,0 x 3,5 mm I180023	<table border="0"> <tr> <td>Malléable</td> <td>Rigide</td> </tr> <tr> <td>Malleable</td> <td>Rigid</td> </tr> <tr> <td>Maleable</td> <td>Rigida</td> </tr> </table> 3 x 4 mm I180030 I180035  5 x 6 mm I180031 I180036 7 x 8 mm I180032 I180037 9 x 10 mm I180033 I180038	Malléable	Rigide	Malleable	Rigid	Maleable	Rigida	N° 1 I180385  N° 2 I180386 N° 3 I180387
Malléable	Rigide							
Malleable	Rigid							
Maleable	Rigida							
Double ronde Double round Doble ronda	Double Double Doble	Anses Loops Bucle						
 3 mm 2 mm I180022 14 cm - 5 1/2"	 3 mm 4 mm I180035 20 cm - 8"	 N° 1 3,4 mm N° 2 3,9 mm N° 3 4,6 mm I180385 16,5 cm - 6 1/2"						


 2,0 mm


 3,0 mm


 3,0 mm


 3,5 mm


 3 mm


 4 mm


 5 mm


 6 mm


 7 mm


 8 mm


 9 mm


 10 mm

XII - 56

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
I180023	CURETTE WILLIGER DOUBLE RONDE L:140MM 3MM	3661219208259
	WILLIGER CURETTE DOUBLE ROUND L:140MM WIDTH 3MM	

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

47525

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X30Cr13(1.4028)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Landanger 2015

12-056

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*