

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	--

Editée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
I180387	ANSE DE BILLEAU L:165MM 4,6MM N° 3	3661219208365
	BILLEAU HANDLE L:165MM N° 3	

Catalogues / catalogs

Landanger 2015

Chapitre-page

12-056

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

L A N D A N G E R

O.R.L. cures - E.N.T. cures - O.R.L. cures

WILLIGER 2,0 x 3,0 mm I180022  3,0 x 3,5 mm I180023	CLOVIS VINCENT <table border="0"> <tr> <td>Malléable</td><td>Rigide</td></tr> <tr> <td>Malleable</td><td>Rigid</td></tr> <tr> <td>Maleable</td><td>Rigida</td></tr> </table> 3 x 4 mm I180030 I180035  5 x 6 mm I180031 I180036 7 x 8 mm I180032 I180037 9 x 10 mm I180033 I180038	Malléable	Rigide	Malleable	Rigid	Maleable	Rigida	BILLEAU N° 1 I180385  N° 2 I180386 N° 3 I180387
Malléable	Rigide							
Malleable	Rigid							
Maleable	Rigida							

Double ronde
Double round
Doble ronda



3 mm

2 mm

I180022
14 cm - 5 1/2"

Double
Double
Doble



3 mm

4 mm

I180035
20 cm - 8"

Anses
Loops
Bucle



N° 1
3,4 mm

N° 2
3,9 mm

N° 3
4,6 mm

I180385
16,5 cm - 6 1/2"

XII - O.R.L.
XII - E.N.T.
XII - O.R.L.

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
I180387	ANSE DE BILLEAU L:165MM 4,6MM N° 3	3661219208365
	BILLEAU HANDLE L:165MM N° 3	 3 661219 208365

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

46768

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X30Cr13(1.4028)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Landanger 2015

12-056

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*