

|                   |                                                           |                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| L A N D A N G E R | FICHE TECHNIQUE PRODUIT<br><i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i> | FAQ 026 INFO<br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-29

Page

1

| REFERENCE | DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>       | CODE EAN                                                                                               |
|-----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I182052   | CANULE ASPIRATION ANGULEE L:90MM D:2,0MM | 3661219417026                                                                                          |
|           | SUCTION CANNULA ANGLED L:90MM D:2.0MM    | <br>3 661219 417026 |

Catalogues / *catalogs*

ORL 2021

Chapitre-page

202

## DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*

L A N D A N G E R

Aspirateurs - Suction-tubes - Tubos de aspiración

**L: 90 mm**

- I182050 Ø 1.0 mm
- I182051 Ø 1.5 mm
- I182052 Ø 2.0 mm

**L: 110 mm**

- I182053 Ø 2.5 mm
-  I182054 Ø 3.0 mm
- I182055 Ø 4.0 mm
- I182056 Ø 5.0 mm

**L: 90 mm**

- I182057 Ø 3.0 mm
-  I182058 Ø 3.5 mm
- I182059 Ø 4.5 mm



**I182054**  
12 cm - 4 3/4"



**I182058**  
13 cm - 5"

Conique  
Conical  
Cónico

202

 1/1

Copyright © LANDANGER - 2018 - 2021

|           |                                                           |                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| LANDANGER | FICHE TECHNIQUE PRODUIT<br><i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i> | FAQ 026 INFO<br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-29

Page

2

| REFERENCE | DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>       | CODE EAN                                                                                               |
|-----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I182052   | CANULE ASPIRATION ANGULEE L:90MM D:2,0MM | 3661219417026                                                                                          |
|           | SUCTION CANNULA ANGLED L:90MM D:2.0MM    | <br>3 661219 417026 |

### INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :

Ila

Code GMDN :

57822

*CE Class :*

*GMDN code :*

### PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :

REUTILISABLE/REUSABLE

*Operating room medical device :*

### CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

*Material type :*

Nuance matière :

X8CrNiS18-9(1.4305, 303)

*Material grade :*

Dimensions :

Voir désignations produits

ORL 2021

*Outer dimensions :*

*See products description*

Chapitre-pages

202

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.

*Cleaning / Pre-disinfection :* *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

| Méthode de stérilisation à la vapeur saturée | Température     | Durée      | Temps de séchage | Pression absolue            |
|----------------------------------------------|-----------------|------------|------------------|-----------------------------|
| Pré-vide                                     | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes       | 2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |

*Sterilization process :*

*The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.*

| Saturated steam sterilization method | Temperature     | Time       | Drying time | Absolute pressure          |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-------------|----------------------------|
| Pre-vacuum                           | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes  | 2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |

### EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement :

Pochette plastique en polyéthylène (PE).

*Packaging :*

*Polyethylene plastic pouch (PE).*