

|                   |                                                                  |                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| L A N D A N G E R | <b>FICHE TECHNIQUE PRODUIT</b><br><b>PRODUCT TECHNICAL SHEET</b> | <b>FAQ 026 INFO</b><br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

Editée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

| REFERENCE | DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS          | CODE EAN                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I182104   | CANULE FRAZIER L:170MM D:2.6MM CH08  | 3661219345404                                                                                          |
|           | FRAZIER CANNULA L:170MM D:2,6MM CH08 | <br>3 661219 345404 |

Catalogues / catalogs

Landanger 2015

Chapitre-page

12-058

### DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

## L A N D A N G E R

O.R.L. canules aspiratrices - E.N.T. suction tubes - O.R.L. canulas aspirantes

| FRAZIER  |         |       | FERGUSSON |         |       |
|----------|---------|-------|-----------|---------|-------|
| Ø 2,0 mm | I182102 | Ch 6  | Ø 2,0 mm  | I182202 | Ch 6  |
| Ø 2,3 mm | I182103 | Ch 7  | Ø 2,3 mm  | I182203 | Ch 7  |
| Ø 2,6 mm | I182104 | Ch 8  | Ø 2,6 mm  | I182204 | Ch 8  |
| Ø 3,0 mm | I182105 | Ch 9  | Ø 3,0 mm  | I182205 | Ch 9  |
| Ø 3,3 mm | I182106 | Ch 10 | Ø 3,3 mm  | I182206 | Ch 10 |
| Ø 4,0 mm | I182108 | Ch 12 | Ø 4,0 mm  | I182208 | Ch 12 |
| Ø 5,0 mm | I182109 | Ch 15 | Ø 5,0 mm  | I182209 | Ch 15 |



I182105  
17 cm - 6<sup>3/4"</sup>



I182205  
17 cm - 6<sup>3/4"</sup>

XII - O.R.L.  
XI - E.N.T.  
XI - O.R.L.

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015

XII - 58



|           |                                                           |                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| LANDANGER | FICHE TECHNIQUE PRODUIT<br><i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i> | FAQ 026 INFO<br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

| REFERENCE | DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>   | CODE EAN                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I182104   | CANULE FRAZIER L:170MM D:2.6MM CH08  | 3661219345404                                                                                          |
|           | FRAZIER CANNULA L:170MM D:2,6MM CH08 | <br>3 661219 345404 |

### INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :  
*CE Class :*

Ia

Code GMDN :  
*GMDN code :*

57822

### PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :  
*Operating room medical device :*

REUTILISABLE/REUSABLE

### CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :  
*Material type :*

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :  
*Material grade :*

X8CrNiS18-9(1.4305)

Dimensions : Voir désignations produits  
*Outer dimensions :* *See products description*  
Chapitre-pages

Landanger 2015

12-058

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.  
*Cleaning / Pre-disinfection :* *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

| Méthode de stérilisation à la vapeur saturée | Température     | Durée      | Temps de séchage | Pression absolue            |
|----------------------------------------------|-----------------|------------|------------------|-----------------------------|
| Pré-vide                                     | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes       | 2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |

*Sterilization process :*

*The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.*

| Saturated steam sterilization method | Temperature     | Time       | Drying time | Absolute pressure          |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-------------|----------------------------|
| Pre-vacuum                           | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes  | 2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |

### EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).  
*Packaging :* *Polyethylene plastic pouch (PE).*