

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	--

Editée le / Publishing date

2022-04-29

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
I182134	CANULE ASPIRATION LUER-LOCK 1,5MM LU 70MM DE HOUSE	3661219410843
	HOUSE SUCTION CANNULA LUER-LOCK 1.5MM WL 70MM	 3 661219 410843

Catalogues / catalogs

ORL 2021

Chapitre-page

135

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

L A N D A N G E R

Aspirateurs - Suction-tubes - Tubos de aspiración

LUER LOCK



V028001

HOUSE

Rotatif
Rotatable
Giratorio



I182140

Rotatif
Rotatable
Giratorio



I122000

WULLSTEIN



I182141

HOUSE



L: 65 mm

I182130	Ø 0,6 mm
I182131	Ø 0,8 mm
I182132	Ø 1,0 mm
I182133	Ø 1,2 mm
I182134	Ø 1,5 mm
I182135	Ø 1,8 mm
I182136	Ø 2,0 mm
I182137	Ø 2,5 mm
I182139	Ø 3,0 mm

HOUSE



L: 100 mm

I182190	Ø 0,6 mm
I182191	Ø 0,8 mm
I182192	Ø 1,0 mm
I182193	Ø 1,2 mm
I182194	Ø 1,5 mm
I182195	Ø 1,8 mm
I182196	Ø 2,0 mm
I182197	Ø 2,5 mm
I182198	Ø 3,0 mm

DEVEZE



L: 115 mm

-	
I182161	Ø 0,8 mm
I182162	Ø 1,0 mm
I182163	Ø 1,2 mm
I182164	Ø 1,5 mm
I182165	Ø 1,8 mm
I182166	Ø 2,0 mm
I182167	Ø 2,5 mm
I182168	Ø 3,0 mm



I182133
9,5 cm - 3 3/4"

Copyright © LANDANGER - 2018 - 2021

135

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-29

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
I182134	CANULE ASPIRATION LUER-LOCK 1,5MM LU 70MM DE HOUSE	3661219410843
	HOUSE SUCTION CANNULA LUER-LOCK 1.5MM WL 70MM	

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

Ila

Code GMDN :
GMDN code :

57822

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X8CrNiS18-9(1.4305, 303)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

ORL 2021

135

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*