

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	---

Éditée le / Publishing date

2022-04-29

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
J01311-20	MICRO PORTE AIGUILLE BAIONNETTE YASARGIL COURBE VERS LE HAUT L:200MM STREAMLINE	3661219434627
	YASARGIL BAYONET MICRO NEEDLE HOLDER, UPWARDS CURVED L:200M STREAMLINE	

Catalogues / catalogs

OrthoVertebre 2019

Chapitre-page

57

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

L A N D A N G E R

Micro Porte-aiguilles - Micro Needle Holders - Micro Porta-Agujas



Streamline

Droit
Straight
Recto

Mors 0,4 mm
0.4 mm jaws
Boca 0,4 mm

Sans Verrou Without Ratchet Sin Cerradura	Avec Verrou With Ratchet Con cerradura
J01314-20 L : 200 mm - 8"	J01316-20 L : 200 mm - 8"
J01314-22 L : 225 mm - 9"	J01316-22 L : 225 mm - 9"
J01314-24 L : 240 mm - 9 1/2"	J01316-24 L : 240 mm - 9 1/2"

Mors 0,9 mm
0.9 mm jaws
Boca 0,9 mm

Sans Verrou Without Ratchet Sin Cerradura	Avec Verrou With Ratchet Con cerradura
J01310-20 L : 200 mm - 8"	J01312-20 L : 200 mm - 8"
J01310-22 L : 225 mm - 9"	J01312-22 L : 225 mm - 9"
J01310-24 L : 240 mm - 9 1/2"	J01312-24 L : 240 mm - 9 1/2"



Yasargil

Courbe
Curved
Curvo

Mors 0,4 mm
0.4 mm jaws
Boca 0,4 mm

Sans Verrou Without Ratchet Sin Cerradura	Avec Verrou With Ratchet Con cerradura
J01315-20 L : 200 mm - 8"	J01317-20 L : 200 mm - 8"
J01315-22 L : 225 mm - 9"	J01317-22 L : 225 mm - 9"
J01315-24 L : 240 mm - 9 1/2"	J01317-24 L : 240 mm - 9 1/2"

Mors 0,9 mm
0.9 mm jaws
Boca 0,9 mm

Sans Verrou Without Ratchet Sin Cerradura	Avec Verrou With Ratchet Con cerradura
J01311-20 L : 200 mm - 8"	J01313-20 L : 200 mm - 8"
J01311-22 L : 225 mm - 9"	J01313-22 L : 225 mm - 9"
J01311-24 L : 240 mm - 9 1/2"	J01313-24 L : 240 mm - 9 1/2"

Copyright © LANDANGER - 2019

1/1

57

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-29

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
J01311-20	MICRO PORTE AIGUILLE BAIONNETTE YASARGIL COURBE VERS LE HAUT L:200MM STREAMLINE	3661219434627
	YASARGIL BAYONET MICRO NEEDLE HOLDER, UPWARDS CURVED L:200M STREAMLINE	 3 661219 434627

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

12726

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X20Cr13(1.4021)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

OrthoVertebre 2019

57

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Sterilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*