

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	---	---

Éditée le / Publishing date

2022-04-29

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
J01325-22	MICRO PORTE AIGUILLE BAIONNETTE YASARGIL COURBE VERS LE HAUT AVEC VERROU MORS 0,4MM L:225MM STREAMLINE DIAMONITE	3661219435051
	YASARGIL BAYONET MICRO NEEDLE HOLDER, CURVED WITH RATCHET 0,4MM JAWS L:225MM STREAMLINE DIAMONITE	 3 661219 435051

Catalogues / catalogs

OrthoVertebre 2019

Chapitre-page

58

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*

L A N D A N G E R

Micro Porte-aiguilles - Micro Needle Holders - Micro Porta-Agujas



Diamonite



Streamline



Yasargil

Droit
Straight
Recto

Mors 0,4 mm
0.4 mm jaws
Boca 0,4 mm

Courbe
Curved
Curvo

Mors 0,4 mm
0.4 mm jaws
Boca 0,4 mm

Sans Verrou Without Ratchet Sin Cerradura J01322-20 L : 200 mm - 8" J01322-22 L : 225 mm - 9" J01322-24 L : 240 mm - 9 1/2"	Avec Verrou With Ratchet Con cerradura J01324-20 L : 200 mm - 8" J01324-22 L : 225 mm - 9" J01324-24 L : 240 mm - 9 1/2"	Mors 0,9 mm 0.9 mm jaws Boca 0,9 mm Sans Verrou Without Ratchet Sin Cerradura J01318-20 L : 200 mm - 8" J01318-22 L : 225 mm - 9" J01318-24 L : 240 mm - 9 1/2"	Avec Verrou With Ratchet Con cerradura J01320-20 L : 200 mm - 8" J01320-22 L : 225 mm - 9" J01320-24 L : 240 mm - 9 1/2"
---	--	---	--

Sans Verrou
Without Ratchet
Sin Cerradura

J01319-20
L : 200 mm - 8"

J01319-22
L : 225 mm - 9"

J01319-24
L : 240 mm - 9 1/2"

Avec Verrou
With Ratchet
Con cerradura

J01321-20
L : 200 mm - 8"

J01321-22
L : 225 mm - 9"

J01321-24
L : 240 mm - 9 1/2"

Sans Verrou
Without Ratchet
Sin Cerradura

J01319-20
L : 200 mm - 8"

J01319-22
L : 225 mm - 9"

J01319-24
L : 240 mm - 9 1/2"

Avec Verrou
With Ratchet
Con cerradura

J01321-20
L : 200 mm - 8"

J01321-22
L : 225 mm - 9"

J01321-24
L : 240 mm - 9 1/2"

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-29

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
J01325-22	MICRO PORTE AIGUILLE BAIONNETTE YASARGIL COURBE VERS LE HAUT AVEC VERROU MORS 0,4MM L:225MM STREAMLINE DIAMONITE	3661219435051
	YASARGIL BAYONET MICRO NEEDLE HOLDER, CURVED WITH RATCHET 0,4MM JAWS L:225MM STREAMLINE DIAMONITE	 3 661219 435051

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

12726

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X20Cr13(1.4021)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

OrthoVertebre 2019

58

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*