

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-29

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
J01477-23	MICRO DISSECTION BAIONNETTE MORS ANNEAU 1X0,5MM L:230MM	3661219436706
	BAYONET MICRO DISSECTING FORCEPS 1X0,5MM RING JAWS L:230MM	 3 661219 436706

Catalogues / *catalogs*

OrthoVertebre 2019

Chapitre-page

18

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*

I - Pincers à Dissection
I - Dissecting Forceps
I - Pinzas para disección

L A N D A N G E R

Micro Pincers à Dissection - Micro Tissue Forceps - Micro Pinzas de Disección

Copyright © LANDANGER - 2019

Mors lisses
Blunt jaws
Bocas lissa

Ø 1,0 mm



J01477-21
U: 80 mm - 3^{1/4}"



J01477-23
U: 100 mm - 4"

J01477-25
U: 120 mm - 4^{3/4}"

Mors striés
Serrated jaws
Bocas Estriadas

Ø 1,0 mm



J01478-21
U: 80 mm - 3^{1/4}"



J01478-23
U: 100 mm - 4"

J01478-25
U: 120 mm - 4^{3/4}"

Extrémité anneau
Ring Tip
Extremidad Anillo



U

Mors lisses
Blunt jaws
Bocas lissa

Ø 2,0 mm



J01479-21
U: 80 mm - 3^{1/4}"



J01479-23
U: 100 mm - 4"

J01479-25
U: 120 mm - 4^{3/4}"

Mors striés
Serrated jaws
Bocas Estriadas

Ø 2,0 mm



J01480-21
U: 80 mm - 3^{1/4}"



J01480-23
U: 100 mm - 4"

J01480-25
U: 120 mm - 4^{3/4}"

Avec Diamonite
With Diamonite
Con Diamonite

Ø 1,0 mm

J01481-21
U: 80 mm - 3^{1/4}"

J01481-23
U: 100 mm - 4"

J01481-25
U: 120 mm - 4^{3/4}"

Avec Diamonite
With Diamonite
Con Diamonite

Ø 2,0 mm

J01482-21
U: 80 mm - 3^{1/4}"

J01482-23
U: 100 mm - 4"

J01482-25
U: 120 mm - 4^{3/4}"

18



LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-29

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
J01477-23	MICRO DISSECTION BAIONNETTE MORS ANNEAU 1X0,5MM L:230MM	3661219436706
	BAYONET MICRO DISSECTING FORCEPS 1X0,5MM RING JAWS L:230MM	 3 661219 436706

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

62466

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X20Cr13(1.4021)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

OrthoVertebre 2019

18

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Sterilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*