

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	--

Editée le / Publishing date

2022-04-29

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
J162993	MICRO ENUCLEATEUR LANDOLT BAIONNETTE L:260MM VERS LE HAUT, DROITE, MALLEABLE TRANCHANT	3661219433217
	LANDOLT BAYONET MICRO ENCULEATOR L:260MM CURVED UP, RIGHT, MALLEABLE SHARP	 3 661219 433217

Catalogues / catalogs

OrthoVertebre 2019

Chapitre-page

75

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

L A N D A N G E R

Micro Dissecteurs - Micro Dissectors - Micro Disectores

Hardy-Fahlbusch	Enucleateur - Enudator - Enucleatores	Landolt
		Malléable Malleable Maleable  J162991 L : 245 mm - 95°
Courbe en haut Upward curved Curva arriba  J231310 L : 245 mm - 95°	Courbe en haut Upward curved Curva arriba  J162993 L : 260 mm - 10°	Courbe en bas Downward curved Curva abajo  J162992 L : 260 mm - 10°
Courbe en bas Downward curved Curva abajo  J231311 L : 245 mm - 95°	Tranchant Sharp Cortante  J162994 L : 260 mm - 10°	
		Mousse Blunt Roma  J162992 L : 260 mm - 10°

Copyright © LANDANGER - 2019

IV - Dissecteurs
 IV - Dissector
 IV - Disectores

75

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-29

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
J162993	MICRO ENUCLEATEUR LANDOLT BAIONNETTE L:260MM VERS LE HAUT, DROITE, MALLEABLE TRANCHANT	3661219433217
	LANDOLT BAYONET MICRO ENCULEATOR L:260MM CURVED UP, RIGHT, MALLEABLE SHARP	 3 661219 433217

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

11290

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X20Cr13(420A) + X5CrNi18-10(304)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

OrthoVertebre 2019

75

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*