

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	---

Éditée le / Publishing date

2022-04-29

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
J163017	MICRO CURETTE CERVICAL BAIONNETTE L:240MM 2.4MM VERS LE HAUT, DROITE, MANCHE NOIR	3661219433446
	BAYONET CERVICAL MICRO CURETTE L:240MM 2.4MM BACKWARD, STRAIGHT, BLACK HANDLE	

Catalogues / catalogs

OrthoVertebre 2019

Chapitre-page

137

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

L A N D A N G E R

Curettes - Curettes - Curetas

**Droit
Stright
Recta**

En avant
Forward
Inoltrare

En arrière
Backward
Indietro

Modèle	Largeur	Longueur
J163024	1,6 mm	L : 240 mm - 9 ^{1/2} "
J163025	2,4 mm	L : 240 mm - 9 ^{1/2} "
J163026	2,7 mm	L : 240 mm - 9 ^{1/2} "
J163027	3,0 mm	L : 240 mm - 9 ^{1/2} "
J163033	3,5 mm	L : 240 mm - 9 ^{1/2} "
J163034	4,0 mm	L : 240 mm - 9 ^{1/2} "



**Coudé
Angled
Angulada**

En avant
Forward
Inoltrare

En arrière
Backward
Indietro

Modèle	Largeur	Longueur
J163028	1,6 mm	L : 240 mm - 9 ^{1/2} "
J163029	2,4 mm	L : 240 mm - 9 ^{1/2} "
J163030	2,7 mm	L : 240 mm - 9 ^{1/2} "
J163031	3,0 mm	L : 240 mm - 9 ^{1/2} "
J163036	3,5 mm	L : 240 mm - 9 ^{1/2} "
J163037	4,0 mm	L : 240 mm - 9 ^{1/2} "

**Coudé bas
Angled down
Angulada bajo**

En avant
Forward
Inoltrare

En arrière
Backward
Indietro

Modèle	Largeur	Longueur
J163038	3,0 mm	L : 240 mm - 9 ^{1/2} "
J163039	3,5 mm	L : 240 mm - 9 ^{1/2} "
J163040	4,0 mm	L : 240 mm - 9 ^{1/2} "

Modèle	Largeur	Longueur
J163016	1,6 mm	L : 240 mm - 9 ^{1/2} "
J163017	2,4 mm	L : 240 mm - 9 ^{1/2} "
J163018	2,7 mm	L : 240 mm - 9 ^{1/2} "
J163019	3,0 mm	L : 240 mm - 9 ^{1/2} "
J163042	3,5 mm	L : 240 mm - 9 ^{1/2} "
J163043	4,0 mm	L : 240 mm - 9 ^{1/2} "
J163020	1,6 mm	L : 240 mm - 9 ^{1/2} "
J163021	2,4 mm	L : 240 mm - 9 ^{1/2} "
J163022	2,7 mm	L : 240 mm - 9 ^{1/2} "
J163023	3,0 mm	L : 240 mm - 9 ^{1/2} "
J163045	3,5 mm	L : 240 mm - 9 ^{1/2} "
J163046	4,0 mm	L : 240 mm - 9 ^{1/2} "
J163047	3,0 mm	L : 240 mm - 9 ^{1/2} "
J163048	3,5 mm	L : 240 mm - 9 ^{1/2} "
J163049	4,0 mm	L : 240 mm - 9 ^{1/2} "

Copyright © LANDANGER - 2019
 4/5

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-29

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
J163017	MICRO CURETTE CERVICAL BAIONNETTE L:240MM 2.4MM VERS LE HAUT, DROITE, MANCHE NOIR	3661219433446
	BAYONET CERVICAL MICRO CURETTE L:240MM 2.4MM BACKWARD, STRAIGHT, BLACK HANDLE	 3 661219 433446

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

31335

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE + ALUMINIUM / STAINLESS STEEL + ALUMINIUM

Nuance matière :
Material grade :

X20Cr13(420A) + Al

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

OrthoVertebre 2019

137

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*