

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-29

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
J163036	MICRO CURETTE LOMBAIRE BAIONNETTE L:240MM 3.5MM VERS LE BAS, 45° BAS, MANCHE NOIR	3661219433637
	BAYONET LUMBAR MICRO CURETTE L:240MM 3.5MM FORWARD, 45° DOWN, BLACK HANDLE	 3 661219 433637

Catalogues / *catalogs*

OrthoVertebre 2019

Chapitre-page

137

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*

L A N D A N G E R

Curettes - Curettes - Curetas

Droit
Stright
Recta

En avant
Forward
Inoltrare

En arrière
Backward
Indietro

J163024	1,6 mm	J163016
L: 240 mm - 9 ^{1/2} "		L: 240 mm - 9 ^{1/2} "
J163025	2,4 mm	J163017
L: 240 mm - 9 ^{1/2} "		L: 240 mm - 9 ^{1/2} "
J163026	2,7 mm	J163018
L: 240 mm - 9 ^{1/2} "		L: 240 mm - 9 ^{1/2} "
J163027	3,0 mm	J163019
L: 240 mm - 9 ^{1/2} "		L: 240 mm - 9 ^{1/2} "
J163033	3,5 mm	J163042
L: 240 mm - 9 ^{1/2} "		L: 240 mm - 9 ^{1/2} "
J163034	4,0 mm	J163043
L: 240 mm - 9 ^{1/2} "		L: 240 mm - 9 ^{1/2} "



Coudé
Angled
Angulada

En avant
Forward
Inoltrare

En arrière
Backward
Indietro

J163028	1,6 mm	J163020
L: 240 mm - 9 ^{1/2} "		L: 240 mm - 9 ^{1/2} "
J163029	2,4 mm	J163021
L: 240 mm - 9 ^{1/2} "		L: 240 mm - 9 ^{1/2} "
J163030	2,7 mm	J163022
L: 240 mm - 9 ^{1/2} "		L: 240 mm - 9 ^{1/2} "
J163031	3,0 mm	J163023
L: 240 mm - 9 ^{1/2} "		L: 240 mm - 9 ^{1/2} "
J163036	3,5 mm	J163045
L: 240 mm - 9 ^{1/2} "		L: 240 mm - 9 ^{1/2} "
J163037	4,0 mm	J163046
L: 240 mm - 9 ^{1/2} "		L: 240 mm - 9 ^{1/2} "

Coudé bas
Angled down
Angulada bajo

En avant
Forward
Inoltrare

En arrière
Backward
Indietro

J163038	3,0 mm	J163047
L: 240 mm - 9 ^{1/2} "		L: 240 mm - 9 ^{1/2} "
J163039	3,5 mm	J163048
L: 240 mm - 9 ^{1/2} "		L: 240 mm - 9 ^{1/2} "
J163040	4,0 mm	J163049
L: 240 mm - 9 ^{1/2} "		L: 240 mm - 9 ^{1/2} "

Copyright © LANDANGER - 2019

4/5

V - Curettes
V - Curettes
V - Curetas

137

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-29

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
J163036	MICRO CURETTE LOMBAIRE BAIONNETTE L:240MM 3.5MM VERS LE BAS, 45° BAS, MANCHE NOIR	3661219433637
	BAYONET LUMBAR MICRO CURETTE L:240MM 3.5MM FORWARD, 45° DOWN, BLACK HANDLE	 3 661219 433637

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

31335

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE + ALUMINIUM / STAINLESS STEEL + ALUMINIUM

Nuance matière :
Material grade :

X20Cr13(420A) + Al

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

OrthoVertebre 2019

137

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*