

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	--

Editée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
J17060	PINCE RONGEUR SPURLING L:180MM MORS DROITS 4X10MM	3661219076117
	SPURLING LAMINECTOMY RONGEUR L:180MM STRAIGHT JAWS 4X10MM	 3 661219 076117

Catalogues / catalogs

Landanger 2015

Chapitre-page

11-011

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

L A N D A N G E R

Neurochirurgie : pinces rongeurs - Neurosurgery : laminectomy rongeurs - Neurocirugía : pinzas para laminectomía



J170160



30°



30°



30°

	Largeur de mors Width of jaw Anchura de boca	Longueur tige Length of shaft Largo del tallo	Droite Straight Recta	Vers le haut Upward Hacia arriba	Vers le bas Downward Hacia abajo
CUSHING					
	2 x 10 mm	13 cm - 5 1/8"	J17001	J17002	J17003
		15 cm - 6"	J170040	J170041	J170042
		18 cm - 7"	J17005	J17006	J17007
		23 cm - 9"	J170043	J170044	-
		28 cm - 11"	J170046	J170047	-
LOVE-GRUENWALD					
	3 x 10 mm	13 cm - 5 1/8"	J17010	J17012	J17015
		15 cm - 6"	J170160	J170161	J170162
		18 cm - 7"	J17020	J17025	J17035
		23 cm - 9"	J170163	J170164	-
		28 cm - 11"	J170166	J170167	-
SPURLING					
	4 x 10 mm	13 cm - 5 1/8"	J17045	J17050	J17055
		15 cm - 6"	J170560	J170561	J170562
		18 cm - 7"	J17060	J17065	J17070
		23 cm - 9"	J170563	J170564	-
		28 cm - 11"	J170566	J170567	-

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015

XI - 11

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
J17060	PINCE RONGEUR SPURLING L:180MM MORS DROITS 4X10MM	3661219076117
	SPURLING LAMINECTOMY RONGEUR L:180MM STRAIGHT JAWS 4X10MM	 3 661219 076117

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

35541

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X20Cr13(1.4021) + X8CrNiS18-9(1.4305)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Landanger 2015

11-011

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*