

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	--

Editée le / Publishing date

2022-04-29

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
J1751554R	RONGEUR CASPAR A BAIONNETTE A DROITE DEMONTABLE L:150MM MORS COUDES HAUT 4X15MM	3661219418771
	DETACHABLE RIGHT BAYONET CASPAR RONGEUR L:150MM UPWARD ANGLED JAWS 4X15MM	

Catalogues / catalogs

OrthoVertebre 2019

Chapitre-page

265


DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

L A N D A N G E R

Pinces rongeurs - Rongeurs forceps - Pinzas para laminectomía

Caspar

Démontable - Baïonnette à droite - Detachable - Bayonet to the right - Desmontable - Bayoneta a la derecha

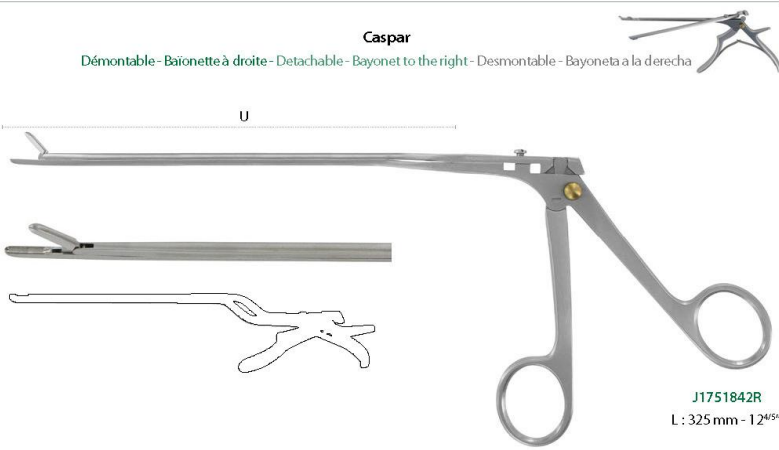

J1751842R
L: 325 mm - 12^{4/5}"

Orientation	Jaw Width (mm)	Model	Model	Model
Droite / Straight / Recto	2 x 15 mm	J1751142R	J1751542R	J1751842R
	3 x 15 mm	J1751143R	J1751543R	J1751843R
	4 x 15 mm	J1751144R	J1751544R	J1751844R
	5 x 15 mm	J1751145R	J1751545R	J1751845R
Vers le haut / Upward / Hacia arriba (30°)	2 x 15 mm	J1751152R	J1751552R	J1751852R
	3 x 15 mm	J1751153R	J1751553R	J1751853R
	4 x 15 mm	J1751154R	J1751554R	J1751854R
	5 x 15 mm	J1751155R	J1751555R	J1751855R
Vers le bas / Downward / Hacia abajo (30°)	2 x 15 mm	J1751162R	J1751562R	J1751862R
	3 x 15 mm	J1751163R	J1751563R	J1751863R
	4 x 15 mm	J1751164R	J1751564R	J1751864R
	5 x 15 mm	J1751165R	J1751565R	J1751865R

U: Longueur utile
U: Working length
U: Longitud útil

265

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-29

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
J1751554R	RONGEUR CASPAR A BAIONNETTE A DROITE DEMONTABLE L:150MM MORS COUDES HAUT 4X15MM	3661219418771
	DETACHABLE RIGHT BAYONET CASPAR RONGEUR L:150MM UPWARD ANGLED JAWS 4X15MM	 3 661219 418771

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :

I

Code GMDN :

35541

CE Class :

GMDN code :

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :

REUTILISABLE/REUSABLE

Operating room medical device :

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Material type :

Nuance matière :

X20Cr13(1.4021)

Material grade :

Dimensions :

Voir désignations produits

OrthoVertebre 2019

Outer dimensions :

See products description

Chapitre-pages

265

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.

Cleaning / Pre-disinfection : Standard conditions for reusable surgical instruments

Sterilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement :

Pochette plastique en polyéthylène (PE).

Packaging :

Polyethylene plastic pouch (PE).