

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	--	--

Editée le / Publishing date

2022-04-29

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
J1751842	RONGEUR CASPAR A BAIONNETTE DEMONTABLE L:180MM MORS DROITS 2X15MM	3661219419327
	DETACHABLE BAYONET CASPAR RONGEUR L:180MM STRAIGHT JAWS 2X15MM	

Catalogues / catalogs

OrthoVertebre 2019

Chapitre-page

263


DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

LANDANGER

Pinces rongeurs - Rongeurs forceps - Pinzas para laminectomía

Caspar

Démontable - Baionette - Detachable - Bayonet - Desmontable - Bayoneta

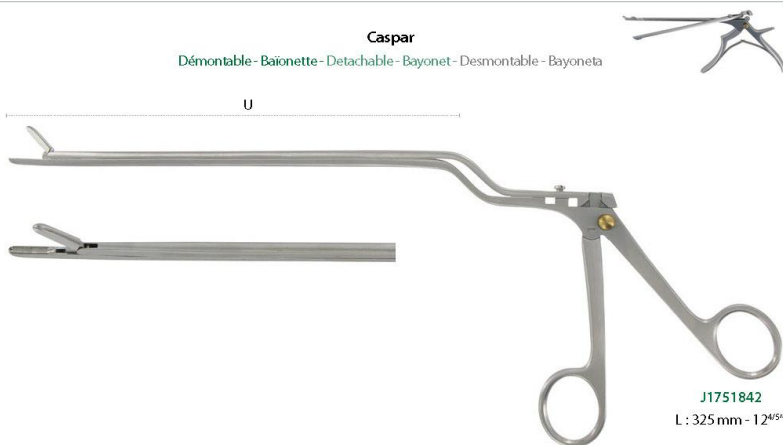

J1751842
L : 325 mm - 12^{4/5}"

 Droite Straight Recto	 2 x 15 mm	 3 x 15 mm	 4 x 15 mm	 5 x 15 mm	U : 110 mm - 4 ^{1/2} "	U : 150 mm - 6"	U : 180 mm - 7"
					J1751142	J1751542	J1751842
					J1751143	J1751543	J1751843
					J1751144	J1751544	J1751844
					J1751145	J1751545	J1751845
 30° Vers le haut Upward Hacia arriba	 2 x 15 mm	 3 x 15 mm	 4 x 15 mm	 5 x 15 mm	U : 110 mm - 4 ^{1/2} "	U : 150 mm - 6"	U : 180 mm - 7"
					J1751152	J1751552	J1751852
					J1751153	J1751553	J1751853
					J1751154	J1751554	J1751854
					J1751155	J1751555	J1751855
 30° Vers le bas Downward Hacia abajo	 2 x 15 mm	 3 x 15 mm	 4 x 15 mm	 5 x 15 mm	U : 110 mm - 4 ^{1/2} "	U : 150 mm - 6"	U : 180 mm - 7"
					J1751162	J1751562	J1751862
					J1751163	J1751563	J1751863
					J1751164	J1751564	J1751864
					J1751165	J1751565	J1751865

U : Longueur utile
U : Working length
U : Longitud útil

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-29

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
J1751842	RONGEUR CASPAR A BAIONNETTE DEMONTABLE L:180MM MORS DROITS 2X15MM	3661219419327
	DETACHABLE BAYONET CASPAR RONGEUR L:180MM STRAIGHT JAWS 2X15MM	 3 661219 419327

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

35541

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X20Cr13(1.4021)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

OrthoVertebre 2019

263

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*