

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	--

Éditée le / Publishing date

2022-04-29

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
J1751864L	RONGEUR CASPAR A BAIONNETTE A GAUCHE DEMONTABLE L:180MM MORS COUDES BAS 4X15MM	3661219419969
	DETACHABLE LEFT BAYONET CASPAR RONGEUR L:180MM DOWNWARD ANGLED JAWS 4X15MM	 3 661219 419969

Catalogues / catalogs

OrthoVertebre 2019

Chapitre-page

267


DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

L A N D A N G E R

Pinces rongeurs - Rongeurs forceps - Pinzas para laminectomía

Caspar

Démontable - Baïonnette à gauche - Detachable - Bayonet to the left - Desmontable - Bayoneta a la izquierda

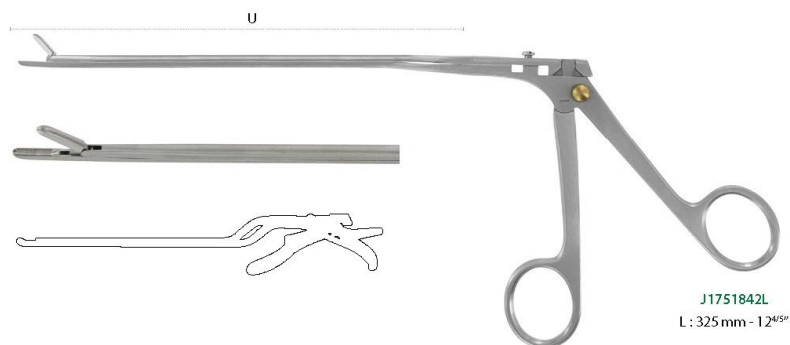

Droite Straight Recto	Largeur de mors Width of jaw Anchura de boca	Longueur tige Shaft length Largo del tallo	Longueur tige Shaft length Largo del tallo	Longueur tige Shaft length Largo del tallo
U	U: 110 mm - 4 1/2\"	U: 150 mm - 6\"	U: 180 mm - 7\"	
	2 x 15 mm	J1751142L	J1751542L	J1751842L
	3 x 15 mm	J1751143L	J1751543L	J1751843L
	4 x 15 mm	J1751144L	J1751544L	J1751844L
	5 x 15 mm	J1751145L	J1751545L	J1751845L
30°	Vers le haut Upward Hacia arriba	U: 110 mm - 4 1/2\"	U: 150 mm - 6\"	U: 180 mm - 7\"
	2 x 15 mm	J1751152L	J1751552L	J1751852L
	3 x 15 mm	J1751153L	J1751553L	J1751853L
	4 x 15 mm	J1751154L	J1751554L	J1751854L
	5 x 15 mm	J1751155L	J1751555L	J1751855L
30°	Vers le bas Downward Hacia abajo	U: 110 mm - 4 1/2\"	U: 150 mm - 6\"	U: 180 mm - 7\"
	2 x 15 mm	J1751162L	J1751562L	J1751862L
	3 x 15 mm	J1751163L	J1751563L	J1751863L
	4 x 15 mm	J1751164L	J1751564L	J1751864L
	5 x 15 mm	J1751165L	J1751565L	J1751865L

U: Longueur utile
U: Working length
U: Longitud útil

267

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-29

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
J1751864L	RONGEUR CASPAR A BAIONNETTE A GAUCHE DEMONTABLE L:180MM MORS COUDES BAS 4X15MM	3661219419969
	DETACHABLE LEFT BAYONET CASPAR RONGEUR L:180MM DOWNWARD ANGLED JAWS 4X15MM	 3 661219 419969

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

35541

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X20Cr13(1.4021)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

OrthoVertebre 2019

267

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*