

|                   |                                                    |                                                 |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| L A N D A N G E R | FICHE TECHNIQUE PRODUIT<br>PRODUCT TECHNICAL SHEET | FAQ 026 INFO<br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Éditée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

| REFERENCE | DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS                     | CODE EAN                                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J24371    | RUGINE A LIGAMENTS JAUNES L:200MM 7MM           | 3661219076919                                                                                          |
|           | RASPATORY FOR YELLOW LIGAMENT L:200MM WIDTH 7MM | <br>3 661219 076919 |

Catalogues / catalogs

Landanger 2015

Chapitre-page

13-048

### DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

**L A N D A N G E R**

Rugines - Raspatories - Raspadores

**CLOVIS-VINCENT**

Pour ligament jaune  
For yellow ligament  
Para ligamento amarillo

7 mm



**J24371**  
20 cm - 8"

**LELIEVRE**

Pour les doigts  
For fingers  
Para los dedos

4 mm



**J243705**  
17 cm - 6 3/4"

6 mm



**J08010**  
17 cm - 6 3/4"

10 mm




**J080101**  
19 cm - 7 1/2"

Courbe  
Curved  
Curva



**J08010**

Droite  
Straight  
Recta

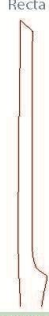

**J080101**

4 mm



**J243706**

Droite  
Straight  
Recta



**J243705**

Courbe  
Curved  
Curva



**J243706**

XIII - Osseux  
XIII - Bones surgery  
XIII - Cragla osea

**XIII - 48**

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015

|           |                                                           |                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| LANDANGER | FICHE TECHNIQUE PRODUIT<br><i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i> | FAQ 026 INFO<br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

| REFERENCE | DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>              | CODE EAN                                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J24371    | RUGINE A LIGAMENTS JAUNES L:200MM 7MM           | 3661219076919                                                                                          |
|           | RASPATORY FOR YELLOW LIGAMENT L:200MM WIDTH 7MM | <br>3 661219 076919 |

### INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :

I

Code GMDN :

12844

*CE Class :*

*GMDN code :*

### PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :

REUTILISABLE/REUSABLE

*Operating room medical device :*

### CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

*Material type :*

Nuance matière :

X30Cr13(1.4028) + X5CrNi18-10(1.4301)

*Material grade :*

Dimensions :

Voir désignations produits

Landanger 2015

*Outer dimensions :*

*See products description*

Chapitre-pages

13-048

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.

*Cleaning / Pre-disinfection : Standard conditions for reusable surgical instruments*

Sterilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

| Méthode de stérilisation à la vapeur saturée | Température     | Durée      | Temps de séchage | Pression absolue            |
|----------------------------------------------|-----------------|------------|------------------|-----------------------------|
| Pré-vide                                     | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes       | 2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |

*Sterilization process :*

*The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.*

| Saturated steam sterilization method | Temperature     | Time       | Drying time | Absolute pressure          |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-------------|----------------------------|
| Pre-vacuum                           | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes  | 2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |

### EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement :

Pochette plastique en polyéthylène (PE).

*Packaging :*

*Polyethylene plastic pouch (PE).*