

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	--

Editée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
J243722	ELEVATEUR PERIOSTAL HOWART DOUBLE TRANCHANT/MOUSSE L:215MM 5MM	3661219305644
	HOWART DOUBLE PERIOSTAL ELEVATOR SHARP/BLUNT L:215MM 5MM	 3 661219 305644

Catalogues / catalogs

Landanger 2015

Chapitre-page

13-027

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

L A N D A N G E R

Rugines et dissecteurs - Raspatories and elevators - Raspadores y elevadores

MOREL FATIO

4 mm

Tranchant Sharp Cortante



Mousse Blunt Romo

5,4 mm

J24372
22 cm - 8 3/4"

HOWARTH

5 mm

Tranchant Sharp Cortante



Mousse Blunt Romo

5 mm

J243722
21,5 cm - 8 1/2"

DAVIS

6 mm

Mousse Blunt Romo



Tranchant Sharp Cortante

5,5 mm

J16230
24 cm - 9 1/2"

6,5 mm

Tranchant Sharp Cortante



Mousse Blunt Romo

6,5 mm

J162345
22 cm - 8 3/4"

MOLT

8 mm

Tranchant Sharp Cortante



Tranchant Sharp Cortante

4 mm

J235504
19 cm - 7 1/2"

XIII - Osseux
XIII - Bone surgery
XIII - Ciriagiasosa

XIII - 27

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015

1/1

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
J243722	ELEVATEUR PERIOSTAL HOWART DOUBLE TRANCHANT/MOUSSE L:215MM 5MM	3661219305644
	HOWART DOUBLE PERIOSTAL ELEVATOR SHARP/BLUNT L:215MM 5MM	 3 661219 305644

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

45918

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X20Cr13(1.4021)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Landanger 2015

13-027

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Sterilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*