

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	---

Éditée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
J32570	CISEAU OSTEOTOME LAMBOTTE (PAUWELLS) L:240MM 20MM	3661219078524
	PAUWELLS OSTEOTOMY BONE CHISEL L:240MM 20MM	

Catalogues / catalogs

Landanger 2015

Chapitre-page

13-066

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

XIII - Osseux
 XIII - Bones surgery
 XIII - Craniäoosa

L A N D A N G E R

Ciseaux ostéotomes - Osteotomes - Osteotomos

LAMBOTTE (PAUWELLS)


 2.5 mm


 3.2 mm


 3.2 mm


 3.2 mm

	12,5 cm - 5"	16 cm - 6 1/4"	24 cm - 9 1/2"	24 cm - 9 1/2"
	Droit Straight Recto	Droit Straight Recto	Droit Straight Recto	Courbe Curved Curvo
50 mm	-	J32540	J32620	J325430
40 mm	-	J32530	J32610	J325429
35 mm	-	J32520	J32600	J325428
30 mm	-	J32510	J32590	J325427
25 mm	-	J32500	J32580	J325426
20 mm	-	J32490	J32570	J325425
18 mm	-	J324850	J32565	J325424
15 mm	J324627	J32480	J32560	J325423
13 mm	-	J324750	J32555	J325422
12 mm	J324626	-	-	-
10 mm	J324625	J32470	J32550	J325421
8 mm	J324624	J324658	J325455	J325418
6 mm	J324623	-	-	-
5 mm	-	J32465	J325450	J325420
4 mm	J324622	-	-	-
3 mm	J324621	-	-	-
2 mm	J324620	-	-	-


J32470
 16 cm - 6 1/4"


J324623
 12,5 cm - 5"

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015

XIII - 66

 1/1

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
J32570	CISEAU OSTEOTOME LAMBOTTE (PAUWELLS) L:240MM 20MM	3661219078524
	PAUWELLS OSTEOTOMY BONE CHISEL L:240MM 20MM	 3 661219 078524

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

12844

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X30Cr13(1.4028)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Landanger 2015

13-066

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*