

|                   |                                                           |              |                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| L A N D A N G E R | FICHE TECHNIQUE PRODUIT<br><i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i> | FAQ 026 INFO |                   |
|                   |                                                           | Indice : 2   | Date : 01/06/2018 |

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

1

| REFERENCE | DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>                 | CODE EAN                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| J32628    | CISEAU OSTEOTOME CAUCHOIX COURBE L:250MM 10MM      | 3661219078647                                                                       |
|           | CAUCHOIX OSTEOTOMY BONE CHISEL CURVED L:250MM 10MM |  |

Catalogues / *catalogs*

Landanger 2015

Chapitre-page

13-076


### DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*

L A N D A N G E R

Ciseaux ostéotomes, gouges - Osteotomes, gouges - Osteotomos, gubias

XIII - Osseux  
XIII - Bones surgery  
XIII - Crúgla ossa

CAUCHOIX

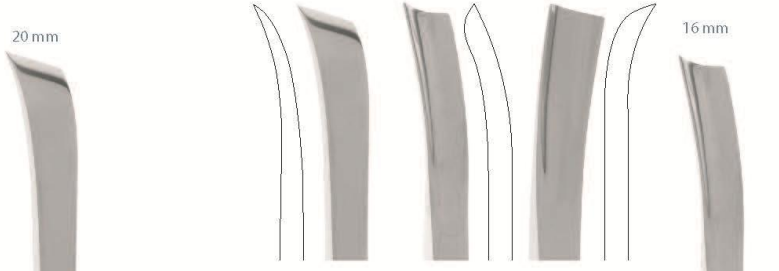

20 mm      16 mm

Osteotome  
Osteotome  
Osteotomo

Gouge  
Gouge  
Gubia

Convexe  
Convexe  
Convexa

Concave  
Concave  
Concava

| 25 cm - 10"     | 25 mm | J32665 | -      | -      |
|-----------------|-------|--------|--------|--------|
|                 | 20 mm | J32660 | J36430 | J36370 |
|                 | 18 mm | J32650 | J36420 | J36360 |
|                 | 16 mm | J32640 | J36410 | J36350 |
|                 | 14 mm | J32630 | -      | -      |
|                 | 12 mm | J32629 | -      | -      |
|                 | 10 mm | J32628 | -      | -      |
|                 | 8 mm  | J32627 | -      | -      |
| 30 cm - 11 3/4" | 20 mm | -      | J36460 | J36400 |
| 18 mm           | -     | J36450 | J36390 |        |
| 16 mm           | -     | J36440 | J36380 |        |

J32650  
25 cm - 10"

J36410  
25 cm - 10"

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015

XIII - 76

 4/5

|           |                                                           |                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| LANDANGER | FICHE TECHNIQUE PRODUIT<br><i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i> | FAQ 026 INFO<br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

| REFERENCE | DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>                 | CODE EAN                                                                                               |
|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J32628    | CISEAU OSTEOTOME CAUCHOIX COURBE L:250MM 10MM      | 3661219078647                                                                                          |
|           | CAUCHOIX OSTEOTOMY BONE CHISEL CURVED L:250MM 10MM | <br>3 661219 078647 |

#### **INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION***

Classe CE :  
*CE Class :*

I

Code GMDN :  
*GMDN code :*

12844

#### **PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE***

Dispositif médical de bloc opératoire :  
*Operating room medical device :*

REUTILISABLE/REUSABLE

#### **CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES***

Type matière :  
*Material type :*

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :  
*Material grade :*

X30Cr13(1.4028)

Dimensions : Voir désignations produits  
*Outer dimensions :* See products description  
Chapitre-pages

Landanger 2015

13-076

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.  
*Cleaning / Pre-disinfection :* Standard conditions for reusable surgical instruments

Sterilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

| Méthode de stérilisation à la vapeur saturée | Température     | Durée      | Temps de séchage | Pression absolue            |
|----------------------------------------------|-----------------|------------|------------------|-----------------------------|
| Pré-vide                                     | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes       | 2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |

*Sterilization process :*

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

| Saturated steam sterilization method | Temperature     | Time       | Drying time | Absolute pressure          |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-------------|----------------------------|
| Pre-vacuum                           | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes  | 2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |

#### **EMBALLAGE / *PACKAGING***

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).  
*Packaging :* Polyethylene plastic pouch (PE).