

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO	
		Indice :	2
		Date :	01/06/2018

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
J327012	CISEAU OSTEOTOME STILLE MANCHE LEGER L:210MM 12MM	3661219078807
	STILLE OSTEOTOMY BONE CHISEL LIGHT HANDLE L:210MM 12MM	 3 661219 078807

Catalogues / *catalogs*

Landanger 2015

Chapitre-page

13-072

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*


L A N D A N G E R

Ciseaux burins, ostéotomes, gouges - Bone chisels, osteotomes, gouges - Osea cincelas, osteotomos, gubias

XIII - Osseux
 XII - Bones surgery
 XII - Ctraqia osea

STILLE

Lame mince
Thin blade
Hoja fina

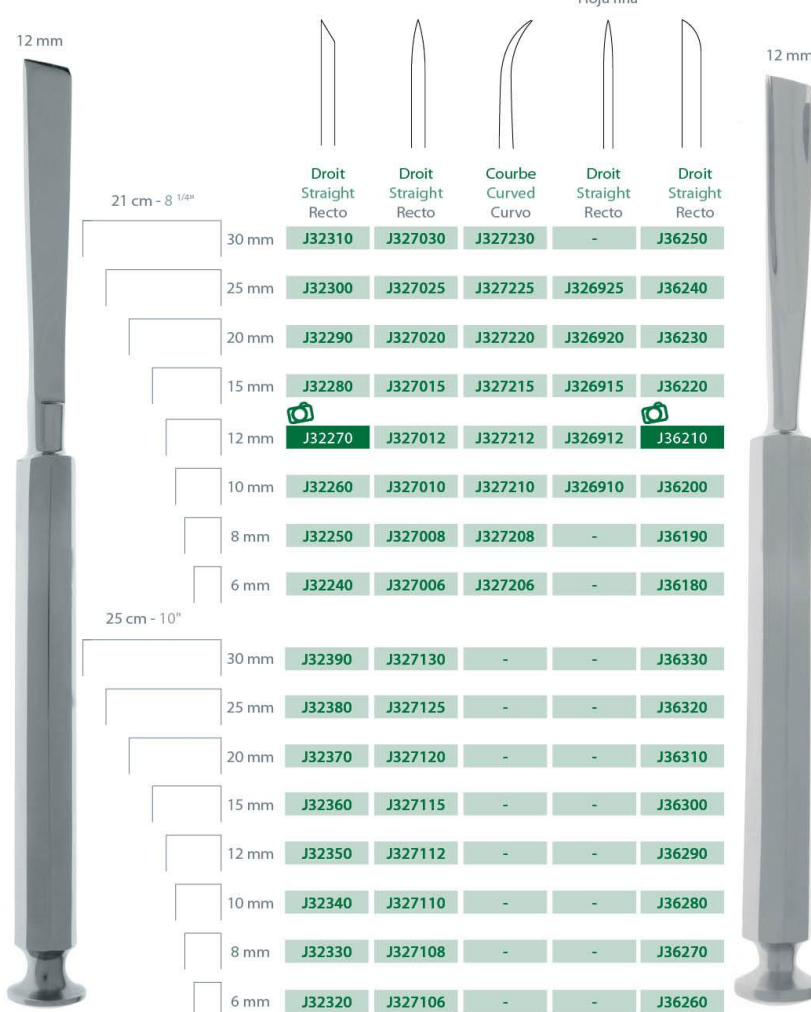

	Droit Straight Recto	Droit Straight Recto	Courbe Curved Curvo	Droit Straight Recto	Droit Straight Recto
30 mm	J32310	J327030	J327230	-	J36250
25 mm	J32300	J327025	J327225	J326925	J36240
20 mm	J32290	J327020	J327220	J326920	J36230
15 mm	J32280	J327015	J327215	J326915	J36220
12 mm	J32270	J327012	J327212	J326912	J36210
10 mm	J32260	J327010	J327210	J326910	J36200
8 mm	J32250	J327008	J327208	-	J36190
6 mm	J32240	J327006	J327206	-	J36180

	J32390	J327130	-	-	J36330
30 mm	J32390	J327130	-	-	J36330
25 mm	J32380	J327125	-	-	J36320
20 mm	J32370	J327120	-	-	J36310
15 mm	J32360	J327115	-	-	J36300
12 mm	J32350	J327112	-	-	J36290
10 mm	J32340	J327110	-	-	J36280
8 mm	J32330	J327108	-	-	J36270
6 mm	J32320	J327106	-	-	J36260

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015

J32270
21 cm - 8 1/4"

J36210
21 cm - 8 1/4"

XIII - 72

1/1

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
J327012	CISEAU OSTEOTOME STILLE MANCHE LEGER L:210MM 12MM	3661219078807
	STILLE OSTEOTOMY BONE CHISEL LIGHT HANDLE L:210MM 12MM	 3 661219 078807

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

12844

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X30Cr13(1.4028)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Landanger 2015

13-072

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*