

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	---	---

Éditée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
J72595	DAVIER LANDANGER BREVETE TIBIA 2 MORS DENTES L:260MM	3661219082460
	LANDANGER PATENTED BONE HOLDING FORCEPS FOR TIBIA 2 TOOTHED JAWS L:260MM	

Catalogues / catalogs

Landanger 2015

Chapitre-page

13-128

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*

XIII - Osseux
 XIII - Bones surgery
 XIII - Cirugía ósea

L A N D A N G E R

Daviers - Bone holding forceps - Pinzas para huesos

LANDANGER

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015



J72595
26 cm - 10 1/4"

Réducteurs : 1 mors denté 1 mors acéré
 Reducing : 1 toothed jaw 1 sharped jaw
 Reductor : 1 boca dentada 1 boca acerada

	 Humérus Humerus Humero 26 cm - 10 1/4" J72600	 Tibia Tibia Tibia J72595	 Fémur Femur Femur J72590
	 Humérus Humerus Humero 26 cm - 10 1/4" J72612	 Tibia Tibia Tibia J72610	 Fémur Femur Femur J72605
	 Humérus Humerus Humero 26 cm - 10 1/4" - J72620 12 mm	 Tibia Tibia Tibia J72615 16 mm	

Préhenseur : 2 mors dentés
 Prehensile : 2 toothed jaws
 Prensador : 2 bocas dentadas

 4/5

XIII - 128

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
J72595	DAVIER LANDANGER BREVETE TIBIA 2 MORS DENTES L:260MM	3661219082460
	LANDANGER PATENTED BONE HOLDING FORCEPS FOR TIBIA 2 TOOTHED JAWS L:260MM	 3 661219 082460

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

46751

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X20Cr13(1.4021)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Landanger 2015

13-128

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Sterilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*