

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	---

Éditée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
J757520	PINCE COUPANTE TYPE TENAILLE L:220MM MORS TUNGSTENE (D:MAXI 2.2MM)	3661219082767
	WIRE CUTTING PLIER PINCERS TYPE L:220MM TC JAWS (DIAM. MAX 2.2MM)	

Catalogues / catalogs

Landanger 2015

Chapitre-page

14-030

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

XIV - Traumatologie
XIV - Traumatology
XIV Traumatologia

L A N D A N G E R

Pinces à couper les fils - Wire cutting pliers - Alicates para cortar alambre

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2022



TC Inserts

COUPE LATÉRALE ET FRONTALE - LATERAL AND FRONTAL CUTTING - CORTE LATERAL Y FRONTAL



Ø max : 1,7 mm

J757508
18 cm - 7"

COUPE FRONTALE - FRONTAL CUTTING - CORTE FRONTAL



Ø max : 2,0 mm

Mors inox
Stainless jaws
Bocas inox

J757506
16,5 cm - 6 1/2"



Ø max : 1,5 mm

J757510
15 cm - 6"



Ø max : 2,2 mm

J757520
22 cm - 8 3/4"

XIV - 30



LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
J757520	PINCE COUPANTE TYPE TENAILLE L:220MM MORS TUNGSTENE (D:MAXI 2.2MM)	3661219082767
	WIRE CUTTING PLIER PINCERS TYPE L:220MM TC JAWS (DIAM. MAX 2.2MM)	 3 661219 082767

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

32885

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE + TUNGSTENE / STAINLESS STEEL + TUNGSTEN

Nuance matière :
Material grade :

X30Cr13(1.4028) + TUNGSTENE

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Landanger 2015

14-030

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*