

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 Indice : 5 Page : 1 / 3 Révisée : 01/06/2018
	MARQUAGE CE / CE MARKING	


INFORMATION DU FABRICANT / MANUFACTURER INFORMATION

Document <i>Document</i>	<i>FICHE TECH</i>	Version <i>Version</i>	20210625
	De SoutterMedical Halton Brook Business Park, Weston Road, Aston Clinton Aylesbury, Buckinghamshire, HP22 5WF, UK		
Classification CE <i>Classification CE</i>	I		

PRODUITS / PRODUCTS

REFERENCES / <i>REFERENCES</i>	DESIGNATIONS / DESIGNATIONS	
J763105	LAME DE SCIE PETIT MODELE D:63.5MM POUR PLATRE (PAQUET DE 5)	<i>SAW BLADE FOR PLASTER SMALL SIZE D:63.5MM (BOX OF 5)</i>
J763155	LAME DE SCIE PETIT MODELE D:63.5MM EN ACIER INOX POUR PLATRE ET RESINE (PAQUET DE 5)	<i>SAW BLADE FOR PLASTER AND RESIN SMALL SIZE STAINLESS STEEL D:63.5MM (BOX OF 5)</i>
J763205	LAME DE SCIE GRAND MODELE D:80MM POUR PLATRE (PAQUET DE 5)	<i>SAW BLADE FOR PLASTER BIG SIZE D:80MM (BOX OF 5)</i>
J763305	LAME DE SCIE EXTRA-DURE D:63.5MM POUR PLATRE ET RESINE (PAQUET DE 5)	<i>SAW BLADE FOR PLASTER AND RESIN EXTRA- HARD D:63.5MM (BOX OF 5)</i>
J763405	LAME DE SCIE EXTRA-DURE D:80MM POUR PLATRE ET RESINE (PAQUET DE 5)	<i>SAW BLADE FOR PLASTER AND RESIN EXTRA- HARD D:80MM (BOX OF 5)</i>

PHOTO OU SCHEMA DU PRODUIT / PHOTO OR SCHEMA OF PRODUCT

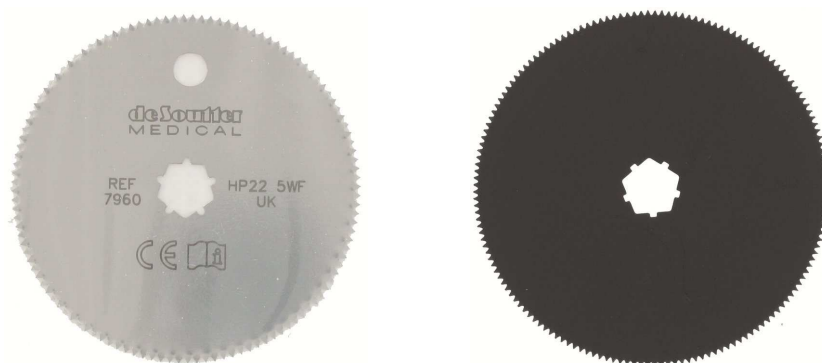

PERFORMANCES REVENDIQUEES / INTENDED USE

Instrumentation chirurgicale réutilisable. Lame de scie pour découpe de bandages en plâtre ou en résine.
Reusable surgical instrumentation. Saw blade for cutting plaster or resin bandages.

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 Indice : 5 Page : 2 / 3 Révisée : 01/06/2018
	MARQUAGE CE / CE MARKING	

CARACTERISTIQUES / FEATURES

➤ Dimensions / Dimensions

Référence / Reference	Diamètre / Diameter
J763105	63,5 mm
J763155	63,5 mm
J763205	80 mm
J763305	63,5 mm
J763405	80 mm

➤ Matériaux (type et nuance) / Materials (type and grade)

Référence / Reference	Matériaux / Materials
J763105	Acier avec revêtement chrome dur PTFE <i>Steel with hard chromium PTFE coating</i>
J763155	Acier inoxydable <i>Stainless steel</i>
J763205	Acier avec revêtement chrome dur PTFE <i>Steel with hard chromium PTFE coating</i>
J763305	Acier avec revêtement diamant sur les dents <i>Steel with diamond coating on the teeth</i>
J763405	Acier avec revêtement diamant sur les dents <i>Steel with diamond coating on the teeth</i>

➤ Durée de vie / Life-time

Durée de vie : Selon la fréquence d'utilisation et la dureté des bandages découpés.
Surveiller l'usure de la denture.

*Lifetime : Depending on the frequency of use and hardness of the cut bandages.
Monitor the wear of the teeth.*

Garantie : 1 an
Warranty: 1 an

➤ Stockage / Storage

Stocker dans un endroit propre et sec.
Store in a clean and dry place.

➤ Nettoyage, pré-désinfection / Cleaning, pre-disinfection

Eventuel dépoussiérage de la denture avec une brosse dure.
Possible dusting of the teeth with a hard brush.

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 Indice : 5 Page : 3 / 3 Révisée : 01/06/2018
	MARQUAGE CE / CE MARKING	

➤ Stérilisation / Sterilization

Non applicable.

Not applicable.

EMBALLAGE / PACKAGING

Pochette plastique en polyéthylène (PE).

Unité de vente : 5 lames

Polyethylene plastic pouch (PE).

Sales unit:5 blades

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / COMPLEMENTARY INFORMATION

Les lames disposent d'une empreinte pentagonale "easy fit", permettant jusqu'à cinq changements de position pour optimiser la durée de vie des lames circulaires.

Blades have 'easy fit' pentagon mounting hole. Circular blades can be rotated up to five times to maximize their useful life.