

|                   |                                                                  |                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| L A N D A N G E R | <b>FICHE TECHNIQUE PRODUIT</b><br><b>PRODUCT TECHNICAL SHEET</b> | <b>FAQ 026 INFO</b><br><b>Indice :</b> 2<br><b>Date :</b> 01/06/2018 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

Editée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

1

| REFERENCE      | DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>                                             | CODE EAN                                                                                               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>J904020</b> | DOIGTIER JAPONAIS - GAZ EN FIL METALLIQUE STERILISABLE<br>GRAND MODELE L:183MM | 3661219349518                                                                                          |
|                | JAPANESE FINGER STALL - METAL WIRE BRAIDING - LARGE MODEL<br>L:183MM           | <br>3 661219 349518 |

Catalogues / *catalogs*

Landanger 2015

Chapitre-page

13-161

### DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*

L A N D A N G E R

Divers - Miscellaneous - Diversos

Filet métallique pour la traction des doigts  
Wire mesh for traction of fingers  
Malla de alambre para tracción de los dedos

| Petit<br>Small<br>Pequeño                                                                          | Moyen<br>Medium<br>Medio | Grand<br>Large<br>Grande |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 154 mm                                                                                             | 170 mm                   | 183 mm                   |
| <b>J904000</b>  | <b>J904010</b>           | <b>J904020</b>           |



**J904000**  
15,4 cm - 6"

Pince pour extraction du ciment  
Cement extraction forceps  
Pinza de extracción de cemento



**J780000**  
38 cm - 15"

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015

XIII - Osseux  
 XIII - Bone surgery  
 XIII - Cirugía ósea

 1/1

 1/2

**XIII - 161**

|           |                                                           |                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| LANDANGER | FICHE TECHNIQUE PRODUIT<br><i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i> | FAQ 026 INFO<br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

| REFERENCE | DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>                                             | CODE EAN                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J904020   | DOIGTIER JAPONAIS - GAZ EN FIL METALLIQUE STERILISABLE<br>GRAND MODELE L:183MM | 3661219349518                                                                                          |
|           | JAPANESE FINGER STALL - METAL WIRE BRAIDING - LARGE MODEL<br>L:183MM           | <br>3 661219 349518 |

### **INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION***

Classe CE :

I-MDR

Code GMDN :

37047

*CE Class :*

*GMDN code :*

### **PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE***

Dispositif médical de bloc opératoire :

REUTILISABLE/REUSABLE

*Operating room medical device :*

### **CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES***

Type matière :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

*Material type :*

Nuance matière :

X5CrNi18-10(1.4301)

*Material grade :*

Dimensions :

Voir désignations produits

Landanger 2015

*Outer dimensions :*

*See products description*

Chapitre-pages

13-161

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.

*Cleaning / Pre-disinfection :* *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

| Méthode de stérilisation à la vapeur saturée | Température     | Durée      | Temps de séchage | Pression absolue            |
|----------------------------------------------|-----------------|------------|------------------|-----------------------------|
| Pré-vide                                     | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes       | 2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |

*Sterilization process :*

*The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.*

| Saturated steam sterilization method | Temperature     | Time       | Drying time | Absolute pressure          |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-------------|----------------------------|
| Pre-vacuum                           | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes  | 2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |

### **EMBALLAGE / *PACKAGING***

Conditionnement :

Pochette plastique en polyéthylène (PE).

*Packaging :*

*Polyethylene plastic pouch (PE).*