

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	--

Éditée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
M01134	TOURNEVIS WILLIAMS POUR VIS A TETE EN CROIX	3661219217022
	WILLIAMS SCREW DRIVER FOR SLOTTED HEAD SCREW	

Catalogues / catalogs

Landanger 2015

Chapitre-page

14-012

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

XIV - Traumatologie
XIV - Traumatology
XIV Traumatologia

L A N D A N G E R

Tournevis - Screw driver - Destornillador

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015



Tournevis avec préhenseur pour vis à tête hexagonale
Screw driver with holding sleeve for hexagonal head
Destornillador cone pinza de sujeción para tornillos con cabeza hexagonal



M01140
1,5 mm
18 cm - 7"

Pour vis
For screw
Para tornillos
Ø 1,5 - 2,0 mm



M01150



M01160
2,5 mm
20 cm - 8"

Pour vis
For screw
Para tornillos
Ø 2,7 - 3,5 - 4,0 mm



M01170



M03060
8 cm - 3"

Embout avec verrouillage rapide - Tip with quick locking system - Punta con bloqueo rápido



1,5 mm **M01175**



2,5 mm **M01176**

POignée
Handle
Mango



3,5 mm **M01177**



M01132



M01134



M01136



M01138
3,5 mm



M01138
23 cm - 9"

XIV - 12



LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
M01134	TOURNEVIS WILLIAMS POUR VIS A TETE EN CROIX	3661219217022
	WILLIAMS SCREW DRIVER FOR SLOTTED HEAD SCREW	 3 661219 217022

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

33968

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X30Cr13(1.4028)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Landanger 2015

14-012

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Sterilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*