

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	--

Editée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
M01210	TIGE DE TOURNEVIS POUR VIS A TETE EN CROIX - ENCLIQUETAGE CYLINDRIQUE	3661219217121
	SCREW DRIVER PIN FOR SLOTTED HEAD SCREW CYLINDRE-SHAPED LOCKING SYSTEM	

Catalogues / catalogs

Landanger 2015

Chapitre-page

14-013

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

L A N D A N G E R

Tournevis - Screw driver - Destornillador

Manche pour tournevis - encliquetage cylindrique
Handle for screw driver - cylindric locking system
Mango para destornillador - bloqueo cilindrico



Tournevis 2,5 mm
Screw driver 2,5 mm
Destornillador 2,5 mm

M01220
18 cm - 7"

M01230
17 cm - 6 3/4"

Tournevis 3,5 mm
Screw driver 3,5 mm
Destornillador 3,5 mm


M01235
17 cm - 6 3/4"

Tournevis Philips
Screw driver Philips
Destornillador Philips


M01240
17 cm - 6 3/4"

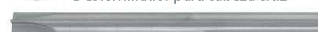
Petit tournevis de Philips
Screw driver Philips head small
Destornillador Philips pequeño


M01241
17 cm - 6 3/4"

Tournevis à tête fendue
Screw driver for single head
Destornillador cabeza simple


M01200
17 cm - 6 3/4"

Tournevis à tête en croix
Screw driver for slotted head
Destornillador para cabeza cruz


M01210
17 cm - 6 3/4"

A L L E N

Clés hexagonales
Hexagonal keys
Llaves hexagonales



1,5 mm	M012915	9 cm - 3 1/4"	4,0 mm	M012940	13,5 cm - 5 1/4"
2,0 mm	M012920	10 cm - 4"	5,0 mm	M012950	15,5 cm - 6"
2,5 mm	M012925	11 cm - 4 1/4"	6,0 mm	M012960	17 cm - 6 3/4"
3,0 mm	M012930	12,5 cm - 5"			

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015



XIV - 13

XIV - Traumatologie
XIV - Traumatology
XIV - Traumatología

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
M01210	TIGE DE TOURNEVIS POUR VIS A TETE EN CROIX - ENCLIQUETAGE CYLINDRIQUE	3661219217121
	SCREW DRIVER PIN FOR SLOTTED HEAD SCREW CYLINDRE-SHAPED LOCKING SYSTEM	 3 661219 217121

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

33968

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X30Cr13(1.4028)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Landanger 2015

14-013

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*