

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	--

Editée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
M01241	TIGE DE TOURNEVIS EMPREINTE PHILIPS - ENCLIQUETAGE CYLINDRIQUE - PM	3661219217176
	SCREW DRIVER PIN PHILIPS FOOTPRINT CYLINDRE-SHAPED LOCKING SYSTEM GRAND MODEL	

Catalogues / catalogs

Landanger 2015

Chapitre-page

14-013

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

L A N D A N G E R

Tournevis - Screw driver - Destornillador

Manche pour tournevis - encliquetage cylindrique
Handle for screw driver - cylindric locking system
Mango para destornillador - bloqueo cilindrico



 Tournevis 2,5 mm
Screw driver 2,5 mm
Destornillador 2,5 mm

M01220
18 cm - 7"



M01230
17 cm - 6 3/4"

 Tournevis 3,5 mm
Screw driver 3,5 mm
Destornillador 3,5 mm



M01235
17 cm - 6 3/4"

 Tournevis Philips
Screw driver Philips
Destornillador Philips



M01240
17 cm - 6 3/4"

 Petit tournevis de Philips
Screw driver Philips head small
Destornillador Philips pequeño



M01241
17 cm - 6 3/4"

 Tournevis à tête fendue
Screw driver for single head
Destornillador cabeza simple



M01200
17 cm - 6 3/4"

 Tournevis à tête en croix
Screw driver for slotted head
Destornillador para cabeza cruz



M01210
17 cm - 6 3/4"

ALLEN

Clés hexagonales
Hexagonal keys
Llaves hexagonales



1,5 mm **M012915** 9 cm - 3 1/4"
2,0 mm **M012920** 10 cm - 4"
2,5 mm **M012925** 11 cm - 4 1/4"
3,0 mm **M012930** 12,5 cm - 5"

4,0 mm **M012940** 13,5 cm - 5 1/4"
5,0 mm **M012950** 15,5 cm - 6"
6,0 mm **M012960** 17 cm - 6 3/4"

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015



XIV - 13

XIV - Traumatologie
XIV - Traumatology
XIV - Traumatología

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
M01241	TIGE DE TOURNEVIS EMPREINTE PHILIPS - ENCLIQUETAGE CYLINDRIQUE - PM	3661219217176
	SCREW DRIVER PIN PHILIPS FOOTPRINT CYLINDRE-SHAPED LOCKING SYSTEM GRAND MODEL	

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

33968

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X30Cr13(1.4028)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Landanger 2015

14-013

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Sterilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*