

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
M02091	MANDRIN DE CENTRAGE POUR CLOUS ELASTIQUES D:2.5 A 3.0MM	3661219217404
	CENTERING CHUCK FOR FLEXIBLE NAILS D:2.5MM TO 3.0MM	

Catalogues / *catalogs*

Landanger 2015

Chapitre-page

14-044

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*

L A N D A N G E R

Instrumentation pour clous élastiques - Instrument for flexible nails - Instrumentación para clavos flexibles

XIV - Traumatologie
 XIV - Traumatology
 XIV Traumatología



Trocart avec guide introduction
Trocar with sleeve
Trocar con mandril

120 mm

Ø 6 mm Ø 8 mm

Pour clous
For nails
Para clavos

Ø 1,5 - 3,5 mm **M03321**

Ø 3,5 - 5,0 mm **M03320** 

M03320

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015

XIV - Traumatologie
 XIV - Traumatology
 XIV Traumatología



Impacteur pour clous élastiques (sans mandrin)
Impactor for gliding nails (without sleeve)
Impactor para clavos flexible (sin mandril)

M02080
16 cm - 6 1/4"

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015

XIV - Traumatologie
 XIV - Traumatology
 XIV Traumatología



Mandrin de centrage
Centering sleeve
Mandril para centrar

M02092

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015

XIV - Traumatologie
 XIV - Traumatology
 XIV Traumatología

Pour clous
For nails
Para clavos

Ø 1,5 - 2,0 mm **M02090**

Ø 2,5 - 3,0 mm **M02091**

Ø 3,5 - 5,0 mm **M02092** 

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015

XIV - 44



LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
M02091	MANDRIN DE CENTRAGE POUR CLOUS ELASTIQUES D:2.5 A 3.0MM	3661219217404
	CENTERING CHUCK FOR FLEXIBLE NAILS D:2.5MM TO 3.0MM	 3 661219 217404

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

46165

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X30Cr13(1.4028)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Landanger 2015

14-044

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Sterilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*